

PŘÍLOHA Č. 1

Dočasná náhrada hemofiltru Aquamax HF19

Diacap Acute L

Indikace: CVVH, CVVHD, CVVHDF, SCUF.



V současnosti používané	Dočasná náhrada	Produktové odlišnosti, kterým byste měli věnovat pozornost:
Aquamax HF19 (Vyrobeno spol. Bellco)	Diacap Acute L (Vyrobeno spol. B.Braun)	- Typ portu pro připojení je Hansen. Pro připojení k hadicovému setu AQUALINE je třeba použít adaptér Hansen – Luer Lock adapter viz.níže. - Objem pro předplnění je 121 ml vs. 109 ml. - Způsob sterilizace je gamma vs. ETO. - Materiál membrány je polysulfone (PS) vs. polyethersulfone (PES).

Hansen – Luer Lock adaptér:

Kód produktu: 7210497 (Vyrobeno spol. B.Braun)



	Aquamax HF19	B.Braun Diacap Acute L
Filtr	Hemofiltr	Hemofiltr
Indikace	CVVH, CVVHD, CVVHDF, SCUF	CVVH, CVVHD, CVVHDF, SCUF
Připojení	Luer Lock	Hansen
Potřeba konektoru	Ne	Ano
Objem předplnění	109 ml	121 ml
Cut-off membrány	55 kDa	50 kDa
Způsob sterilizace	ETO	Gamma
UF koeficient	80 ml/h/mmHg při Qb 300 ml/min	72 ml/h/mmHg při Qb 300 ml/min
Max TMP	600 mmHg	600 mmHg
Materiál membrány	Polyethersulfone	Polysulfone

Plocha membrány	1,9 m ²	2,0 m ²
Max průtok krve	500 m./min	500 m./min
Počet ks v balení	20	20

Diacap[®] Acute L Ultrafiltration rate

