

URGENTNÍ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ
Mobilní vozík do sprchy a na toaletu Aquatec® Ocean VIP

Potenciální riziko otevření upínačů na čalounění opěradla ve sklopené poloze

Datum: 19.07.2013


Ref.: 70657

Důležité bezpečnostní informace:

V zájmu bezpečnosti našich zákazníků bychom Vás rádi upozornili, že upínače na čalounění opěradla mobilního vozíku do sprchy a na toaletu Aquatec® Ocean VIP, Ocean VIP XL, Ocean Dual VIP a Ocean E-VIP se mohou otevřít, když se produkt používá ve sklopené poloze.

Při naší pravidelné kontrole trhu jsme zjistili, že některé upínače nevydrží požadovanou tažnou sílu. Důvodem bylo injekční formování, které nespĺňovalo specifikace designu upínačů. Na zástrčce (samčí část) upínače se nachází 90° převis, který nebyl zcela vyplněn dle specifikací.

Jako preventivní opatření je třeba vyměnit zástrčku (samčí část) všech 5 upínačů na dotčených produktech (viz relevantní pokyny k výměně „Ocean VIP – R001“). Tyto informace platí pro všechny produkty vyrobené mezi říjnem 2012 a dubnem 2013 (SN 14395471 až 14556826 nebo spíše SN 12L04001901 až 13EO4002959).

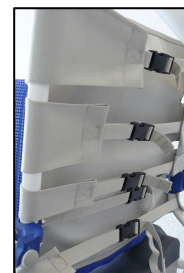

Pokud jste si zakoupili produkty spadající do rozmezí dotčených sériových čísel, společnost Invacare se na Vás obrátí s podrobnějšími informacemi. Zároveň obdržíte příslušné množství upínačů na výměnu. Na dodaném formuláři potvrzení „Ocean VIP – R002“ prosím potvrďte, že jste provedli kontrolu i výměnu upínačů na výrobku (bylo-li to potřebné).

Tyto podrobné informace je nutné poskytnout veškerému relevantnímu personálu ve Vaší organizaci a/nebo zákazníkům.

Společnost Invacare si je vědoma, že se jedná o nepříjemnost; tyto informace jsou však zásadní pro bezpečnost pacientů a uživatelů.

Autor:	A. Romann	Uvolnil:	T. Pradignac	Verze:	02
Datum:		Datum:			

**EF015**

Evropský formulář

Bezpečnostní upozornění

Strana 2 z 2

Pokud máte k tomuto přehledu nějaké dotazy nebo potřebujete další informace, obraťte se na zástupce společnosti Invacare pro vaši zemi – viz [www. Invacare.com](http://www.invacare.com) -> Invacare Worldwide

Aquatec Operations GmbH
Alemannenstrasse 10
88360 Isny – Německo

v zastoupení 
Michael Schreiber
Manažer kontroly kvality

Autor:	A. Romann	Uvolnil:	T. Pradignac	Verze:	02
Datum:		Datum:			