

Cassette Interpretations for Improperly Positioned Cassette Labels

ABD Confirmation Product Code 707135 a ABD Confirmation RUM1 Product Code 6904485																	
ACC & NDC	Správně umístěné kódy						Opačně umístěné kódy						KOMENTÁŘE				
	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6					
	REAGENT	A	B	D	A	B	D	Interpretace	R	D	B	A		D	B	A	Interpretace
	KÓD	A	B	D	A	B	D		L	A	B	D	A	B	D		
	O Pos	0	0	+	/	/	/	O Pos		+	0	0	/	/	/	A Neg	NESPRAVNÝ TYP
	O Neg	0	0	0	/	/	/	O Neg		0	0	0	/	/	/	O Neg	Stejný typ
	A Pos	+	0	+	/	/	/	A Pos		+	0	+	/	/	/	A Pos	Stejný typ
	A Neg	+	0	0	/	/	/	A Neg		0	0	+	/	/	/	O Pos	NESPRAVNÝ TYP
	B Pos	0	+	+	/	/	/	B Pos		+	+	0	/	/	/	AB Neg	NESPRAVNÝ TYP
	B Neg	0	+	0	/	/	/	B Neg		0	+	0	/	/	/	B Neg	Stejný typ
	AB Pos	+	+	+	/	/	/	AB Pos		+	+	+	/	/	/	AB Pos	Stejný typ
	AB Neg	+	+	0	/	/	/	AB Neg		0	+	+	/	/	/	B Pos	NESPRAVNÝ TYP

ABO-Rh/Reverse Product Codes 707155, 707100																	
ABR	Správně umístěné kódy						Opačně umístěné kódy						Komentáře				
	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6					
	REAGENT	A	B	D	CTL	Rev	Rev	Interpretace	R	Rev	Rev	CTL		D	B	A	Interpretace
	KÓD	A	B	D	CTL	Rev	Rev		L	A	B	D	CTL	Rev	Rev		
	O Pos	0	0	+	0	+	+	O Pos		0	0	0	+	+ or 0	+ or 0	chybný Ctl	Chybná interpretace
	O Neg	0	0	0	0	+	+	O Neg		0	0	0	0	+ or 0	+ or 0	O NEG or F/R diskrepance	Tentýž typ chybné interpretace
	A Pos	+	0	+	0	0	+	A Pos		0	0	0	+	0	+ or 0	chybný Ctl	Chybná interpretace
	A Neg	+	0	0	0	0	+	A Pos		0	0	0	0	0	+ or 0	chybný F/R	Chybná interpretace
	B Pos	0	+	+	0	+	0	B Pos		0	0	0	+	+ or 0	0	chybný Ctl & F/R	Chybná interpretace
	B Neg	0	+	0	0	+	0	B Neg		0	0	0	0	+ or 0	0	chybný F/R	Chybná interpretace
	AB Pos	+	+	+	0	0	0	AB Pos		0	0	0	+	0	0	chybný Ctl & F/R	Chybná interpretace
	AB Neg	+	+	0	0	0	0	AB Neg		0	0	0	0	0	0	chybný F/R	Chybná interpretace

ABODD Product Code 707119																	
ADD	Správně umístěné kódy						Opačně umístěné kódy						Komentáře				
	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6					
	REAGENT	A	B	AB	D	D	CTL	Interpretace	R	CTL	D	D		AB	B	A	Interpretace
	KÓD	A	B	AB	D	D	CTL		L	A	B	AB	D	D	CTL		
	O Pos	0	0	0	+	+	0	O Pos		0	+	+	0	0	0	B Neg	NESPRAVNÝ TYP
	O Neg	0	0	0	0	0	0	O Neg		0	0	0	0	0	0	O Neg	Stejný typ
	A Pos	+	0	+	+	+	0	A Pos		0	+	+	+	0	+	chybný Ctl; D diskrepance	chybná interpretace
	A Neg	+	0	+	0	0	0	A Neg		0	0	0	+	0	+	chybná Ctl; D diskrepance	chybná interpretace
	B Pos	0	+	+	+	+	0	B Pos		0	+	+	+	+	0	B Pos	Stejný typ
	B Neg	0	+	+	0	0	0	B Neg		0	0	0	+	+	0	O Pos	NESPRAVNÝ TYP
	AB Pos	+	+	+	+	+	0	AB Pos		0	+	+	+	+	+	chybný Ctl	chybná interpretace
	AB Neg	+	+	+	0	0	0	AB Neg		0	0	0	+	+	+	chybný Ctl	chybná interpretace

Cassette Interpretations for Improperly Positioned Cassette Labels

ABO-Rh Product Codes 707150, 707190																	
ABE	Správně umístěné kódy						Opačně umístěné kódy						Komentáře				
	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6					
	REAGENT	A	B	AB	D	DCE	CTL	Interpretace	R	CTL	DCE	D		AB	B	A	Interpretace
KÓD	A	B	AB	D	DCE	CTL	Interpretace	L	A	B	D	DCE	CTL	Interpretace			
	O Pos	0	0	0	+	+	0	O Pos		0	+	+	0	0	0	<b>B Neg</b>	NESPRÁVNÝ TYP
	O Neg	0	0	0	0	0	0	O Neg		0	0	0	0	0	0	O Neg	Stejný typ
	O D-/CE+	0	0	0	0	+	0	O Neg/CE+		0	+	0	0	0	0	B/AB diskrepance	chybná interpretace
	A Pos	+	0	+	+	+	0	A Pos		0	+	+	+	0	+	chybný CtI	chybná interpretace
	A Neg	+	0	+	0	0	0	A Neg		0	0	0	+	0	+	chybný CtI	chybná interpretace
	A D-/CE+	+	0	+	0	+	0	A Neg/CE+		0	+	0	+	0	+	chybný CtI	chybná interpretace
	B Pos	0	+	+	+	+	0	B Pos		0	+	+	+	+	0	B Pos	Stejný typ
	B Neg	0	+	+	0	0	0	B Neg		0	0	0	+	+	0	<b>O Pos</b>	NESPRÁVNÝ TYP
	B D-/CE+	0	+	+	0	+	0	B Neg/CE+		0	+	0	+	+	0	B/AB diskrepance	chybná interpretace
	AB Pos	+	+	+	+	+	0	AB Pos		0	+	+	+	+	+	chybný CtI	chybná interpretace
	AB Neg	+	+	+	0	0	0	AB Neg		0	0	0	+	+	+	chybný CtI	chybná interpretace
	AB D-/CE+	+	+	+	0	+	0	AB Neg/CE+		0	+	0	+	+	+	chybný CtI	chybná interpretace

Rh/K Phenotype Product Codes 707250, 707280																		
RHP	Správně umístěné kódy						Opačně umístěné kódy						Komentáře					
	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6						
	REAGENT	C	E	c	e	K	CTL	Interpretace	R	CTL	K	e		c	E	C	Interpretace	
KÓD	C	E	c	e	K	CTL	Interpretace	L	C	E	c	e	K	CTL	Interpretace			
	r <sup>r</sup> , K-	R1R2, K-	+	+	+	+	0	0	CcEe		0	0	+	+	+	+	chybný CtI	chybná interpretace
	r <sup>r</sup> , K+	R1R2, K+	+	+	+	+	+	0	CcEeK		0	+	+	+	+	+	chybný CtI	chybná interpretace
	r <sup>r</sup> , K-	R2r, K-	0	+	+	+	0	0	ccEe		0	0	+	+	+	0	<b>ccee (R0r or rr)</b>	NESPRÁVNÝ TYP
	r <sup>r</sup> , K+	R2r, K+	0	+	+	+	+	0	ccEeK		0	+	+	+	+	0	ccEeK	Stejný typ
	rr, K-	R0r, K-	0	0	+	+	0	0	ccee		0	0	+	+	0	0	ccee	Same type
	rr, K+	R0r, K+	0	0	+	+	+	0	cceeK		0	+	+	+	0	0	<b>ccEe (R2r or r<sup>r</sup>)</b>	INCORRECT TYPE
	r <sup>r</sup> , K-	R1r, K-	+	0	+	+	0	0	Ccee		0	0	+	+	0	+	chybný CtI	Invalid interpretation
	r <sup>r</sup> , K+	R1r, K+	+	0	+	+	+	0	CceeK		0	+	+	+	0	+	chybný CtI	Invalid interpretation
	r <sup>r</sup> , K-	R1R1, K-	+	0	0	+	0	0	CCee		0	0	+	0	0	+	chybný CtI	Invalid interpretation
	r <sup>r</sup> , K+	R1R1, K+	+	0	0	+	+	0	CCeeK		0	+	+	0	0	+	chybný CtI	Invalid interpretation
	ryr <sup>r</sup> , K-	RzR1, K-	+	+	0	+	0	0	CCee		0	0	+	0	+	+	chybný CtI	Invalid interpretation
	ryr <sup>r</sup> , K+	RzR1, K+	+	+	0	+	+	0	CCeeK		0	+	+	0	+	+	chybný CtI	Invalid interpretation
	ryry, K-	RzRz, K-	+	+	0	0	0	0	CCEE		0	0	0	0	0	+	chybný CtI	Invalid interpretation
	ryry, K+	RzRz, K+	+	+	0	0	+	0	CCEEK		0	+	0	0	+	+	chybný CtI	Invalid interpretation
	ryr <sup>r</sup> , K-	RzR2, K-	+	+	+	0	0	0	CCEe		0	0	0	+	+	+	chybný CtI	Invalid interpretation
	ryr <sup>r</sup> , K+	RzR2, K+	+	+	+	0	+	0	CcEEK		0	+	0	+	+	+	chybný CtI	Invalid interpretation
	r <sup>r</sup> , K-	R2R2, K-	0	+	+	0	0	0	ccEE		0	0	0	+	+	0	<b>eeK</b>	Incorrect type or /Invalid interpretation
	r <sup>r</sup> , K+	R2R2, K+	0	+	+	0	+	0	ccEEK		0	+	0	+	+	0	<b>EeK</b>	Incorrect type or /Invalid interpretation

Cassette Interpretations for Improperly Positioned Cassette Labels

Rh-hr Phenotype Product Code 707255																	
BRH	Správně umístěné kódy						Interpretace	opačně umístěné kódy						Komentáře			
	1	2	3	4	5	6		1	2	3	4	5	6				
	D	C	E	c	e	CTL		R	CTL	e	c	E	C		D		
	D	C	E	c	e	CTL	Interpretace	L	D	C	E	c	e	CTL	Interpretace		
All D+	+					0	D Pos		All D+ Invalid						+	chybný Ctl	chybná interpretace
r <sup>+</sup> r <sup>+</sup>	0	+	+	+	+	0	CcEe		0	+	+	+	+	0	CcEe		stejný typ
r <sup>+</sup> r	0	0	+	+	+	0	ccEe		0	+	+	+	0	0	CcEE (ryr <sup>+</sup> )		NESPRÁVNÝ TYP
rr	0	0	0	+	+	0	ccee		0	+	+	0	0	0	CCEE (ryry)		NESPRÁVNÝ TYP
r <sup>+</sup> r	0	+	0	+	+	0	Ccee		0	+	+	0	+	0	CCEe (ryr <sup>+</sup> )		NESPRÁVNÝ TYP
r <sup>+</sup> r <sup>+</sup>	0	+	0	0	+	0	CCee		0	+	0	0	+	0	CCee		stejný typ
ryr <sup>+</sup>	0	+	+	0	+	0	CCEe		0	+	0	+	+	0	Ccee (r <sup>+</sup> r)		NESPRÁVNÝ TYP
ryry	0	+	+	0	0	0	CCEE		0	0	0	+	+	0	ccee (rr)		NESPRÁVNÝ TYP
ryr <sup>+</sup>	0	+	+	+	0	0	CcEE		0	0	+	+	+	0	ccEe (r <sup>+</sup> r)		NESPRÁVNÝ TYP
r <sup>+</sup> r <sup>+</sup>	0	0	0	+	+	0	ccEE		0	0	+	+	+	0	ccEE		stejný typ
Anti-Human Globulin Neutral Solution (Poly/Neutral Cassette) Product Codes 707355, 707310																	
PLN	Správně umístěné kódy						Interpretace	opačně umístěné kódy						Komentáře			
	1	2	3	4	5	6		1	2	3	4	5	6				
	IgG,C3	IgG,C3	IgG,C3	Neu	Neu	Neu		R	Neu	Neu	Neu	IgG,C3	IgG,C3		IgG,C3		
	IgG,C3	IgG,C3	IgG,C3	Neu	Neu	Neu	Interpretace	L	IgG,C3	IgG,C3	IgG,C3	Neu	Neu	Neu	Interpretace		
									Falešně negativní IAT					Falešně negativní/pozitivní	Falešně poz/neg screen		
									Falešně pozitivní screen enzymu								

Cassette Interpretations for Improperly Positioned Cassette Labels

ABP Product Code 6901906																
REAGENT KÓD	s						Interpretace	Reverse Label						Interpretace	Kometáře	
	1	2	3	4	5	6		1	2	3	4	5	6			
	A	B	AB	D	CTL	IgG		R	IgG	CTL	D	AB	B			A
O Pos; DAT Neg	0	0	0	+	0	0	O Pos, DAT-	0	0	+	0	0	0	(ABO Discrep), weak A/B, D Neg	Discrp or NESPRÁVNÝ TYP	
O Pos; DAT Pos	0	0	0	+	0	+	O Pos, DAT+	+	0	+	0	0	0	A Neg, DAT Neg	NESPRÁVNÝ TYP; FN DAT	
O Pos; DAT Pos	0	0	+	+	+	+	chybný, DAT+	+	+	+	+	0	0	AB Pos, DAT Neg	NESPRÁVNÝ TYP; FN DAT	
O Neg; DAT Neg	0	0	0	0	0	0	O Neg, DAT-	0	0	0	0	0	0	O Neg, DAT Neg	Stejná interpretace	
O Neg; DAT Pos	0	0	0	0	0	+	O Neg, DAT+	+	0	0	0	0	0	(ABO Discrep), FN DAT	Dicrep, FN DAT	
O Neg; DAT Pos	0	0	+	+	+	+	chybný, DAT+	+	+	+	+	0	0	AB Pos, DAT Neg	NESPRÁVNÝ TYP; FN DAT	
A Pos; DAT Neg	+	0	+	+	0	0	A Pos, DAT-	0	0	+	+	0	+	(ABO Discrep),wk A/B Pos, DAT Pos	???, FP DAT	
A Pos; DAT Pos	+	0	+	+	0	+	A Pos, DAT+	+	0	+	+	0	+	A POS, DAT Pos	Stejná interpretace	
A Pos; DAT Pos	+	0	+	+	+	+	chybný, DAT+	+	+	+	+	0	+	AB Pos, DAT Pos	NESPRÁVNÝ TYP	
A Neg; DAT Neg	+	0	+	0	0	0	A Neg, DAT-	0	0	0	+	0	+	O Pos, DAT Pos	NESPRÁVNÝ TYP; FP DAT	
A Neg; DAT Pos	+	0	+	0	0	+	A Neg, DAT+	+	0	0	+	0	+	(ABO Discrep), D Pos, DAT Pos	Discrp nebo NESPRÁVNÝ TYP	
A Neg; DAT Pos	+	0	+	0	+	+	chybný, DAT+	+	+	0	+	0	+	ABO Discrep, DAT Pos	chybná interpretace	
B Pos; DAT Neg	0	+	+	+	0	0	B Pos, DAT-	0	0	+	+	+	0	chybný Ctl, (ABO Discrep), DAT Neg	chybná interpretace	
B Pos; DAT Pos	0	+	+	+	0	+	B Pos, DAT+	+	0	+	+	+	0	chybný Ctl, DAT Neg	chybná interpretace, FN DAT	
B Pos; DAT Pos	0	+	+	+	+	+	chybný, DAT+	+	+	+	+	+	0	chybný Ctl, DAT Neg	chybná interpretace, FN DAT	
B Neg; DAT Neg	0	+	+	0	0	0	B Neg, DAT -	0	0	0	+	+	0	chybný Ctl, DAT Neg	chybná interpretace	
B Neg; DAT Pos	0	+	+	0	0	+	B Neg, DAT+	+	0	0	+	+	0	chybný Ctl, DAT Neg	chybná interpretace, FN DAT	
B Neg; DAT Pos	0	+	+	0	+	+	chybný, DAT +	+	+	0	+	+	0	chybný Ctl; ABO Discrep; DAT Neg	chybná interpretace, FN DAT	
AB Pos; DAT Neg	+	+	+	+	0	0	AB Pos, DAT -	0	0	+	+	+	+	chybný Ctl, (ABO Discrep); DAT Pos	chybná interpretace, FP DAT	
AB Pos; DAT Pos	+	+	+	+	0	+	AB Pos, DAT+	+	0	+	+	+	+	chybný Ctl, DAT Pos	chybná interpretace	
AB Pos; DAT Pos	+	+	+	+	+	+	chybný, DAT +	+	+	+	+	+	+	chybný Ctl, DAT+	stejná interpretace	
AB Neg; DAT Neg	+	+	+	0	0	0	AB Neg, DAT-	0	0	0	+	+	+	chybný Ctl; DAT Pos	chybná interpretace, FP DAT	
AB Neg; DAT Pos	+	+	+	0	0	+	AB Neg, DAT+	+	0	0	+	+	+	chybný Ctl, DAT Pos	chybná interpretace	
AB Neg; DAT Pos	+	+	+	0	+	+	chybný, DAT+	+	+	0	+	+	+	chybný Ctl; ABO Discrep, DAT Pos	chybná interpretace	

### Cassette Interpretations for Improperly Positioned Cassette Labels

ADK Product Code 707270																	
ADK	správně umístěné kódy						opačně umístěné kódy						komentáře				
		1	2	3	4	5	6		1	2	3	4		5	6		
	REAGENT	A	B	D	D	K	CTL	INTERPRETACE	R	CTL	K	D		D	B	A	
	KÓD	A	B	D	D	K	CTL		L	A	B	D	K	CTL	INTERPRETACE		
	O Pos, K-	0	0	+	+	0	0	O Pos, K Neg		0	0	+	+	0	0	O Pos, K Neg	stejný typ
	O Pos, K+	0	0	+	+	+	0	O Pos, K Pos		0	+	+	+	0	0	<b>B Pos, K Neg</b>	NESPRÁVNÝ TYP
	O Neg, K-	0	0	0	0	0	0	O Neg, K Neg		0	0	0	0	0	0	O Neg, K Neg	stejný typ
	O Neg, K+	0	0	0	0	+	0	O Neg, K Pos		0	+	0	0	0	0	<b>B Neg, K Neg</b>	NESPRÁVNÝ TYP
	A Pos, K-	+	0	+	+	0	0	A Pos, K Neg		0	0	+	+	0	+	chybný CtI	chybná interpretace
	A Pos, K+	+	0	+	+	+	0	A Pos, K Pos		0	+	+	+	0	+	chybný CtI	chybná interpretace
	A Neg, K-	+	0	0	0	0	0	A Neg, K Neg		0	0	0	0	0	+	chybný CtI	chybná interpretace
	A Neg, K+	+	0	0	0	+	0	A Neg, K Pos		0	+	0	0	0	+	chybný CtI	chybná interpretace
	B Pos, K-	0	+	+	+	0	0	B Pos, K Neg		0	0	+	+	+	0	<b>O Pos, K Pos</b>	NESPRÁVNÝ TYP
	B Pos, K+	0	+	+	+	+	0	B Pos, K Pos		0	+	+	+	+	0	B Pos, K Pos	stejný typ
	B Neg, K-	0	+	0	0	0	0	B Neg, K Neg		0	0	0	0	+	0	<b>O Neg, K Pos</b>	NESPRÁVNÝ TYP
	B Neg, K+	0	+	0	0	+	0	B Neg, K Pos		0	+	0	0	+	0	B Neg, K Pos	stejný typ
	AB Pos, K-	+	+	+	+	0	0	AB Pos, K Neg		0	0	+	+	+	+	chybný CtI	chybná interpretace
	AB Pos, K+	+	+	+	+	+	0	AB Pos, K Pos		0	+	+	+	+	+	chybný CtI	chybná interpretace
	AB Neg, K-	+	+	0	0	0	0	AB Neg, K Neg		0	0	0	0	+	+	chybný CtI	chybná interpretace
	AB Neg, K+	+	+	0	0	+	0	AB Neg, K Pos		0	+	0	0	+	+	chybný CtI	chybná interpretace

DAT/IDAT Product Code 707165																	
DAT/IDAT	správně umístěné kódy						opačně umístěné kódy						Komentáře				
		1	2	3	4	5	6		1	2	3	4		5	6		
	REAGENT	IgG	C3	CTL	IgG	C3	CTL	Interpretace	R	CTL	C3	IgG		CTL	C3	IgG	
	KÓDY	IgG	C3	CTL	IgG	C3	CTL		L	IgG	C3	CTL	IgG	C3	CTL	Interpretace	
	IgG Pos	+	0	0				IgG Pos		0	0	+				CTL Pos, CHYBNÝ výsledek	chybná interpretace
	C3 Pos	0	+	0				C3 Pos		0	+	0				C3 Pos	stejný výsledek
	IgG & C3 Pos	+	+	0				IgG & C3 pos		0	+	+				CTL Pos, CHYBNÝ výsledek	chybná interpretace

Chybné typy jsou označeny **ČERVENĚ** pro každou kazetovou konfiguraci  
chybné výsledky kvůli pozitivní kontrol, diskrepanci před a po, diskrepance D/D nebo D/DCE  
Vystínované sloupce představují chybnou orientaci kódu a chybný výsledek