

### **Oprava zdravotnického přístroje Defibrilátor/monitor Philips HeartStart XL+, číslo modelu 861290.**

**Doba nabíjení baterie může překročit 3 hodiny**

Vážení obchodní partneři,

díky zpětné vazbě od zákazníků a internímu testování jsme objevili, že doba nabíjení baterie HeartStart XL+ na 100% kapacitu při teplotě 35 °C (95 °F) je trošku delší, než uváděné 3 hodiny na současných označeních produktu. Protože přístroj XL+ dokáže fungovat s částečně nabitou baterií, nevzniká žádné riziko pro pacienta spojené s delší dobou nabíjení baterie.

Přečtěte si přiložený informační dopis pro zákazníka, který poskytuje informace o způsobu určení dotčených produktů a doporučení činností, které je třeba provést.

Pokud potřebujete další informace nebo podporu v souvislosti s tímto problémem, obraťte se na místního představitele společnosti Philips: <Philips representative contact details to be completed by the KM / country>.

Společnost Philips se omlouvá za všechny komplikace způsobené tímto problémem.

S pozdravem,



John Pardo,  
Ředitel QA/RA  
Péče o pacienta a klinická informatika, Terapeutická péče

## Oprava zdravotnického přístroje Defibrilátor/monitor Philips HeartStart XL+, číslo modelu 861290.

**Doba nabíjení baterie může překročit 3 hodiny**

<b>DOTČENÉ VÝROBKY</b>	<p><b>Produkt:</b> Defibrilátor/monitor Philips HeartStart XL+, číslo modelu 861290.</p> <p><b>Dotčené přístroje:</b> Přístroje vyrobené společností Philips mezi říjnem 2011 a říjnem 2013, s výrobními čísly následujících rozsahů.</p> <table border="1" data-bbox="768 795 1229 1654"><thead><tr><th>Rozsahy výrobních čísel přístrojů XL+</th></tr></thead><tbody><tr><td>USO1100106-USO1100372</td></tr><tr><td>USN1100376-USN1100960</td></tr><tr><td>USD1100961-USD1101095</td></tr><tr><td>US11201095-US11201186</td></tr><tr><td>US21201187-US21201239</td></tr><tr><td>US31201240-US31201537</td></tr><tr><td>US41201538-US41201585</td></tr><tr><td>US51201586-US51201721</td></tr><tr><td>US61201722-US61201924</td></tr><tr><td>US71201925-US71202048</td></tr><tr><td>US81202049-US81202168</td></tr><tr><td>US91202169-US91202514</td></tr><tr><td>US01202515-US01202990</td></tr><tr><td>USN1202991-USN1203537</td></tr><tr><td>USD1203538-USD1203968</td></tr><tr><td>US11303969-US11303972</td></tr><tr><td>US21303980-US21304488</td></tr><tr><td>US31304489-US31305042</td></tr><tr><td>US41305043-US41305295</td></tr><tr><td>US51305296-US51305450</td></tr><tr><td>US61305451-US61306138</td></tr><tr><td>US71306139-US71306542</td></tr><tr><td>US81306543-US81306998</td></tr><tr><td>US91306999-US91307261</td></tr><tr><td>US01307306-US01307458</td></tr></tbody></table> <p><b>Vyrobeny a distribuovány společností:</b> Philips Healthcare, 3000 Minuteman Road, Andover, MA, 01810.</p>	Rozsahy výrobních čísel přístrojů XL+	USO1100106-USO1100372	USN1100376-USN1100960	USD1100961-USD1101095	US11201095-US11201186	US21201187-US21201239	US31201240-US31201537	US41201538-US41201585	US51201586-US51201721	US61201722-US61201924	US71201925-US71202048	US81202049-US81202168	US91202169-US91202514	US01202515-US01202990	USN1202991-USN1203537	USD1203538-USD1203968	US11303969-US11303972	US21303980-US21304488	US31304489-US31305042	US41305043-US41305295	US51305296-US51305450	US61305451-US61306138	US71306139-US71306542	US81306543-US81306998	US91306999-US91307261	US01307306-US01307458
Rozsahy výrobních čísel přístrojů XL+																											
USO1100106-USO1100372																											
USN1100376-USN1100960																											
USD1100961-USD1101095																											
US11201095-US11201186																											
US21201187-US21201239																											
US31201240-US31201537																											
US41201538-US41201585																											
US51201586-US51201721																											
US61201722-US61201924																											
US71201925-US71202048																											
US81202049-US81202168																											
US91202169-US91202514																											
US01202515-US01202990																											
USN1202991-USN1203537																											
USD1203538-USD1203968																											
US11303969-US11303972																											
US21303980-US21304488																											
US31304489-US31305042																											
US41305043-US41305295																											
US51305296-US51305450																											
US61305451-US61306138																											
US71306139-US71306542																											
US81306543-US81306998																											
US91306999-US91307261																											
US01307306-US01307458																											
<b>POPIS PROBLÉMU</b>	Baterie defibrilátoru/monitoru Philips HeartStart XL+ může vyžadovat trochu delší dobu k nabití na 100% kapacitu za teploty 35 °C (95 °F), než uvádí návod k obsluze. Protože přístroj XL+ dokáže fungovat s částečně nabitou baterií, nevzniká žádné riziko pro pacienta spojené s delší dobou nabíjení baterie.																										

## Oprava zdravotnického přístroje Defibrilátor/monitor Philips HeartStart XL+, číslo modelu 861290.

**Doba nabíjení baterie může překročit 3 hodiny**

<b>JAK ZJISTIT DOTČENÉ VÝROBKY</b>	Abyste odhalili dotčený výrobek, najděte model a výrobní číslo přístroje HeartStart XL+, které jsou vytištěné na hlavním štítku na spodní straně přístroje.
<b>DOPORUČENÍ OPATŘENÍ PRO ZÁKAZNÍKA/UŽIVATELE</b>	Věnujte pozornost opraveným specifikacím teplot nabíjení baterie v dodatku k návodu k obsluze Addendum, číslo 453564434511.
<b>OPATŘENÍ PLÁNOVANÁ SPOLEČNOSTÍ PHILIPS</b>	Společnost Philips sama zahájila tuto opravu a poskytuje <u>dodatek k návodu k obsluze HeartStart XL+</u> , číslo 453564434511 pro všechny zákazníky, kteří mají dotčené přístroje. Doba nabíjení vypnutého zařízení a připojeného k napájení z elektrické sítě: Při teplotách 25 °C (77 °F), do 3 hodin na 100% kapacitu; do 2 hodin na 80% kapacitu.
<b>DALŠÍ INFORMACE A PODPORA</b>	Potřebujete-li další informace nebo pomoc v této záležitosti, volejte místního zástupce společnosti Philips na čísle 1-800-722-9377.