

Naléhavé bezpečnostní upozornění

Ref č. upozornění:	UPDATE PAN_SB_RPD_2014-01
Datum dokumentu:	18-2-2014

V Praze, dne 3. března 2014

POSTIŽENÝ VÝROBEK:	Referenční elektroda
POPIS VÝROBKU:	Elektroda OMNI Micro / referenční elektroda
POSTIŽENÝ SYSTÉM:	<Systémy OMNI C, cobas b 121 a b 121<BGE>>
ČÍSLO MATERIÁLU:	03111873180
Č. ŠARŽE (JE-LI PODSTATNÉ):	Všechny šarže
SHRUTÍ PROBLÉMU:	Membrána uvnitř tělesa elektrody může přestat těsnit, což může případně vést k chybným výsledkům měření pH a sodíku.
POŽADOVANÉ OPATŘENÍ:	Vyměňte zasaženou elektrodu, pokud byla instalována před více než 52 týdny.
KONTAKTY:	Technický servis: +420 220 382 500 Země: Česká republika

Vážení přátelé,

v Urgentním bezpečnostním upozornění ze dne 6.2.2014 jste byli informováni o možném problému membrány referenční elektrody. Na základě informace od výrobce vám bylo doporučeno vyměnit referenční elektrodu po 52. týdnu ode dne vložení do přístroje, a to z důvodu garantované záruky této elektrody.

Nicméně obdrželi jsme nové informace ohledně požadovaného nápravného opatření.

Prosíme vás o vyplnění příloženého odpovědního formuláře, zda jste provedli níže uvedená opatření:

Požadovaná opatření:

- Zkontrolujte datum instalace referenčních elektrod na všech systémech OMNI C, **cobas b 121** a **cobas b 121<BGE>**.
- Pokud byla referenční elektroda vložena do analyzátoru před více než 52 týdny, okamžitě ji vyměňte.
- Nastavte si do Plánovače údržby upomínku „výměna referenční elektrody“ v jednoročním cyklu.

Upřímně se omlouváme za případné potíže způsobené tímto problémem.

S přátelským pozdravem

Radoslav Blažek
Head of Professional Services
NPT
radoslav.blazek@roche.com

Hana Ferdová
Product Manager/Application Specialist
hana.ferdova@roche.com
tel.: +420 724 023 831