

## Naléhavé bezpečnostní upozornění

<b>Ref č. upozornění:</b>	<b>UPDATE PAN_SB_RPD_2014-01</b>
<b>Datum dokumentu:</b>	<b>18-02-2014</b>

V Praze, dne 3. března 2014

<b>POSTIŽENÝ VÝROBEK:</b>	<b>Referenční elektroda</b>
<b>POPIS VÝROBKU:</b>	<b>Elektroda OMNI Micro / referenční elektroda</b>
<b>POSTIŽENÝ SYSTÉM:</b>	<b>&lt;Systémy OMNI S a cobas b 221&gt;</b>
<b>ČÍSLO MATERIÁLU:</b>	<b>03111873180</b>
<b>Č. ŠARŽE (JE-LI PODSTATNÉ):</b>	<b>Všechny šarže</b>
<b>SHRnutí PROBLÉMU:</b>	<b>Membrána uvnitř tělesa elektrody může přestat těsnit, což může případně vést k chybným výsledkům měření pH a sodíku.</b>
<b>POŽADOVANÉ OPATŘENÍ:</b>	<b>Vyměňte postiženou elektrodu, pokud byla instalována před více než 52 týdny.</b>
<b>KONTAKTY:</b>	<b>Technický servis: +420 220 382 500 Země: Česká republika</b>

Vážení přátelé,

v Urgentním bezpečnostním upozornění ze dne 6.2.2014 jste byli informováni o možném problému membrány referenční elektrody. Na základě informace od výrobce vám bylo doporučeno vyměnit referenční elektrodu po 52. týdnu ode dne vložení do přístroje, a to z důvodu garantované záruky této elektrody.

Nicméně obdrželi jsme nové informace ohledně požadovaného nápravného opatření.

Prosíme vás o vyplnění přiloženého odpovědního formuláře, zda jste provedli níže uvedená opatření:

**Požadovaná opatření:**

- Zkontrolujte datum instalace referenčních elektrod na všech systémech **OMNI S** a **cobas b 221**.
- Pokud byla referenční elektroda vložena do analyzátoru před více než 52 týdny, okamžitě ji vyměňte.
- Nastavte si „výměna referenční elektrody“ v ročním cyklu údržby.

Upřímně se omlouváme za případné potíže způsobené tímto problémem.

S přátelským pozdravem

Radoslav Blažek  
Head of Professional Services  
Specialist NPT  
[radoslav.blazek@roche.com](mailto:radoslav.blazek@roche.com)

Hana Ferdová  
Product Manager/Application  
[hana.ferdova@roche.com](mailto:hana.ferdova@roche.com)  
tel.: +420 724 023 831