

19 březzen, 2014

Našim partnerům

Tel.: +46 8 557 62 200
Fax: +46 8 557 62 299
info@handicare.se
www.handicare.com

Oznámení k bezpečnému používání

Týká se křídlových držadel pro modely ReTurn 7400 a 7500



Ovlivněná zařízení

Křídlová držadla pro ReTurn7400 a ReTurn7500, u nichž **šrouby nejsou správně vloženy do držadel** – na obrázku 1 označeno červeně. Vztahuje se **jen na modely ReTurn, u nichž je žebřík připojen k podvozku jako na obrázku 2**. Všechny modely ReTurn7400 a ReTurn7500 s touto konstrukcí, dodané do května 2011, mohou mít toto křídlové držadlo. Týká se také náhradních dílů „křídlová držadla“, číslo položky 7322, dodaných v období červen 2009 až červenec 2011.



Obr. 1 Křídlová držadla pro ReTurn, kde je vidět připojení šroubu v držadle.



Obr. 2 Připevnění žebříku na příslušných modelech ReTurn. Křídlové držadlo, západka a žebřík.

Podrobné informace a důvod pro nápravné bezpečnostní oznámení

V období duben 2009 až květen 2011 používala společnost Handicare AB křídlové držadlo, u něž se může šroub a držadlo po opakovaném dotažení oddělit. To způsobuje malou vůli v připojení žebříku, která zapříčiňuje velké zatížení připojovacích děr žebříku. V konečném důsledku to může způsobit mechanickou únavu materiálu žebříku.

Společnost Handicare v květnu 2011 změnila dodavatele křídlových držadel, takže křídlové držadlo má nyní konstrukci, díky níž zůstává šroub bezpečně v držadle, obr. 3, a tím udržuje západku těsně u žebříku a minimalizuje vznik vůle.



Obr. 3 Nový, bezpečnější model křídlového držadla. Závít vede do držadla.


V rámci prevence se společnost Handicare rozhodla vyměnit všechna křídlová držadla, u nichž je připojení šroubu viditelné.

Akce, které musejí podniknout naši partneři

Měli byste neprodleně provést kontrolu všech zařízení ReTurn, která mají příslušné křídlové držadlo. Zkontrolujte všechna používaná zařízení a zařízení ve skladech. Demontujte a zlikvidujte všechny ovlivněné díly.

Kontrola křídlových držadel a žebříků ReTurn

Kontrolu křídlových držadel a žebříků proveďte podle níže uvedeného schématu:

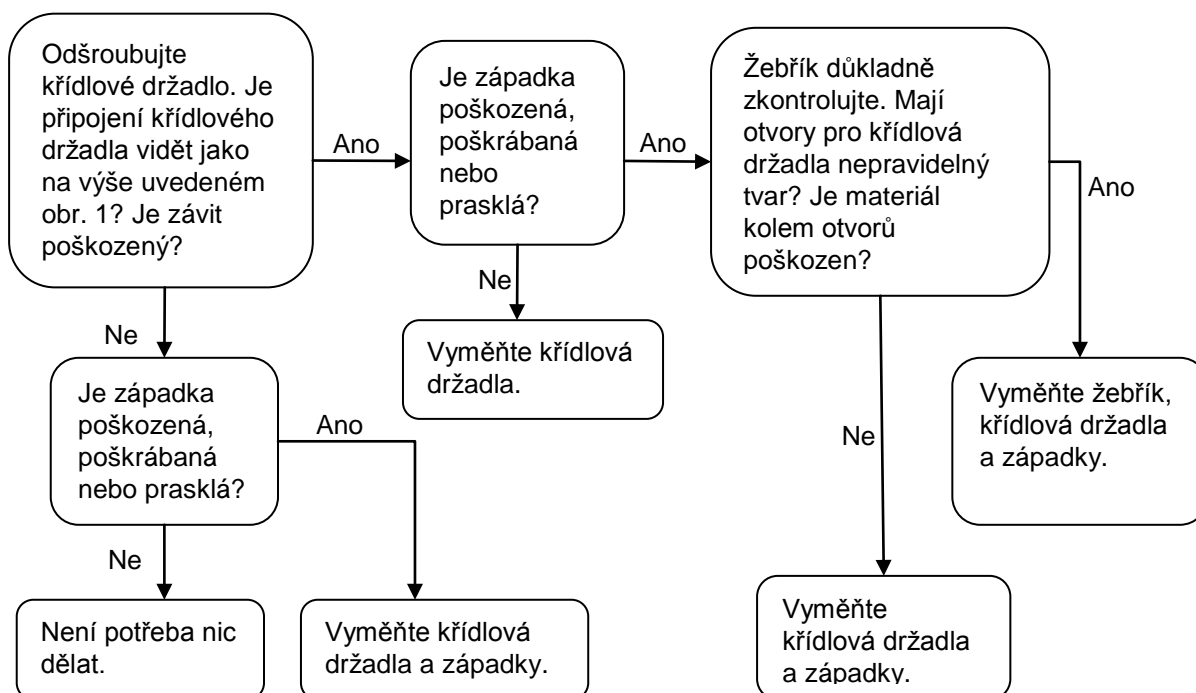

U všech zařízení ReTurn kontrolujte křídlová držadla, západky a žebříky, až na nich v budoucnu budete provádět servis či opravy podle nejnovější verze servisní příručky.

Komu předat toto oznámení k bezpečnému používání

Toto oznámení musíte předat všem těm ve vaší organizaci, kdo o něm musí vědět, a případně i jiné organizaci, do níž byla potenciálně nebezpečná zařízení předána.

Další informace a technické rady

Společnost Handicare AB dodá křídlová držadla, západky a žebříky pro výměnu příslušných komponent. Chcete-li objednat spojovací prvky nebo žebříky, kontaktujte naše zákaznické služby na adrese customerservice@handicare.se nebo telefonu +46 (0)8 557 62 200.

Pokud máte otázky nebo potřebujete technické poradenství, kontaktujte tyto osoby:

Per-Erik Johansson
Technická podpora
per-erik.johansson@handicare.se
Telefon: +46 (0)8 557 622 26

Christoffer Andersson
Technická podpora
christoffer.andersson@handicare.se
Telefon: +46 (0)8 557 622 35

Společnost Handicare AB se upřímně omlouvá svým partnerům za nepříjemnosti, které to může způsobit.

Toto oznámení bylo předáno příslušným úřadům.

Jménem společnosti
Handicare AB

Malin Wallström
Manažer pro jakost a životní prostředí