

CZ-

Vaše značka	Naše značka	Tel. (+420) 271 091-	Fax (+420) 271 091-	Datum
	LOG	333	312	2. 5. 2014

Stáhnutí výrobku: Ventrikulární katetr – Miethke GmbH & Co. KG**Kat. číslo FV435T (Aesculap – č. šarže 4505134634, 4505249729).**

Vážení obchodní přátelé,

dovolte nám, abychom Vás jménem výrobce Christoph Miethke GmbH & Co. KG, Německo a Aesculap AG, Německo, informovali o potřebě stáhnout výše uvedené šarže ventrikulárního katetru s uvedeným katalogovým číslem.

Důvodem k stahování jsou komplikace, které mohou vzniknout při posunu deflektoru na ventrikulárním komorovém katetru. V takovémto případě je možný vznik vady na katetru, která může zůstat nepovšimnuta. Množství takto dotčených výrobků je velmi nízké.

Protože kombinace komorového katetru s deflektorem je součástí celého systému shunt, mohou být postiženy i některé jiné součásti tohoto systému. Pokud si chirurg není jistý, zda posunem deflektoru nepoškodil některou další součást systému, doporučuje se prověření přímo na pacientovi.

V případě, že máte k dispozici výrobek s výše uvedeným katalogovým číslem a s některou z uvedených šarží, prosíme, abyste jej dále nepoužívali a vrátili nám ho zpět.

Vyplňte laskavě přiložený odpovědní formulář a potvrďte nám tím přijetí této bezpečnostní informace a to i v případě, že se u Vás dotčený výrobek nenachází.

S případnými dotazy se obraťte na Zákaznické centrum B. Braun Medical (e-mail: prodej.cz@bbraun.com, tel.: +420-271 091 333) nebo Vašeho obchodního zástupce.

Omlouváme za vzniklé nepříjemnosti!

S pozdravem



ing. Jan Bříza
manažer Logistické sekce



ing. Šárka Paylíková
vedoucí Zákaznického centra

FORMULÁŘ POTVRZENÍ KE STAŽENÍ VÝROBKŮ

VYPLŇTE, PROSÍM, TENTO FORMULÁŘ A do 30.5. JEJ ZAŠLETE E-MAILEM NEBO FAXEM
NA ADRESU Zákaznické centrum B. Braun Medical s.r.o.
e-mail: prodej.cz@bbraun.com, fax.: +420-271 091 312

Potvrzujeme, že jsme obdrželi a pochopili bezpečnostní oznámení ve vztahu k níže uvedenému produktu:

Ventrikulární katetr – Miethke GmbH & Co. KG

Kat. číslo FV435T (Aesculap – č. šarže 4505134634, 4505249729).

1. Potvrzujeme přijetí dopisu o stažení produktů
2. Vyhovující zaškrtněte:

- V našem skladu nemáme žádný z produktů.
- Zasiláme zpět následující položky:

Materiál č.	Množství

Odesílatel:

Klinika: _____

Město: _____

Jméno/funkce : _____

Oddělení: _____ Tel. _____

Podpis: _____

Datum: _____