

URGENT – Bezpečnostní upozornění

Olerup SSP HLA A-low resolution typing kits : A low lot 44V  
A low screening lot 28V  
A-B-C lot 63V +64S  
A-B-DR lot 63S  
A-B-DR-DQ lot 70S

26.května 2014

Věc: Změna v interpretačních tabulkách

---

**POZOR** : Aktualizace interpretačních tabulek OLERUP SSP HLA A-low resolution typing kits.

Podrobnosti změn:

U vyjmenovaných výrobků/šarží se alela A\*74:07 neamplifikuje primerovou směsí na pozici 19, jak je uvedeno v dokumentaci (platí i pro primerovou směs 18 v kitu A-B-DR-DQ). Tato skutečnost byla opravena v tabulkách specifity a interpretačních tabulkách. Změna se týká výrobků/šarží:

A low lot 44V

A low screening lot 28V

A-B-C lot 63V +64S

A-B-DR lot 63S

A-B-DR-DQ lot 70S

Popis problému:

V případě alely A\*74:07 interpretace pozitivních amplifikací vede k chybnému výsledku analýzy, neboť primerová směs 19 je pro tuto alelu falešně negativní (platí i pro primerovou směs 18 v kitu A-B-DR-DQ). S ohledem na aktuální informace, kombinace pozitivních amplifikací (reaktivita primerů) pro alelu A\* 74:07 je shodná s reaktivitou následující skupiny alel: A\* 32:01:14, \* 32:03, \* 32:38.

Informace o opravných tabulkách bude rozeslána distributorem e-mailem. Aktualizovaná dokumentace je dostupná na <http://www.olerup-ssp.com/products/downloads/>

Doporučení pro uživatele:

Použitím nových interpretačních tabulek zkontrolujte interpretaci výsledků typizací kity HLA- A low - viz výše uvedené výrobky/šarže, které detekovaly alely A\*32:01:14, A\*32:03, A\*32:38 a proveďte nové vyhodnocení pomocí revidovaných interpretačních tabulek.

Pro další analýzy DNA použijte již aktualizované interpretační tabulky.

Tato informace musí být zaslána všem, kdo s uvedenými výrobky pracovali.

Žádáme vás laskavě o potvrzení, že jste informaci obdržela a že jí rozumíte. Potvrzení, které najdete v příloze, prosím zašlete na adresu [ruzickova@mertrade.cz](mailto:ruzickova@mertrade.cz).

Kontaktní adresa: Hana Růžičková, Mertrade s.r.o. Olomouc, tel. 585 228 330

