

Urgentní bezpečnostní oznámení

24. 4. 2014

Vážení zákazníci,

společnost FertiliTech by Vás tímto bezpečnostním oznámením vztahujícím se k časosběrnému systému EmbryoScope chtěla informovat, že při čištění nebo dezinfekci můžou kovové svorky způsobit zkrat elektronických komponentů držáku kultivačních misek. Může to vést ke zvýšení teploty v držáku kultivačních misek.


Dotčené produkty	Referenční číslo:	ESD20000, ESD20000-EU, ESD20000-JAP
	Popis:	Inkubátor s časosběrným snímkováním EmbryoScope

Popis problému	Při čištění nebo dezinfekci částí inkubátoru s časosběrným snímkováním EmbryoScope se mohou uvolnit kovové svorky připojené ke komůrce pro embrya zajišťující průhlednou misku nad držákem kultivačních misek.
-----------------------	--

Nebezpečí	<p>Pokud se kovová svorka uvolní a přijde do kontaktu s elektronickými komponenty držáku kultivačních misek, může dojít ke zkratu a následnému zvýšení teploty v držáku kultivačních misek.</p> <p>Alarm inkubátoru s časosběrným snímkováním EmbryoScope se aktivuje, pokud teplota v držáku kultivačních misek překročí o 0,5 °C hodnotu nadefinovanou uživatelem.</p> <p>Pokud dojde ke zkratu elektronických komponentů, může ohřívací prvek zahřát držák kultivačních misek na teplotu překračující limit alarmu o hodnotě 0,5 °C.</p>
------------------	---



Inkubátor s časosběrným snímkováním EmbryoScope s otevřenými vkládacími dvířky a průhledným plastovým krycím panelem na správném místě

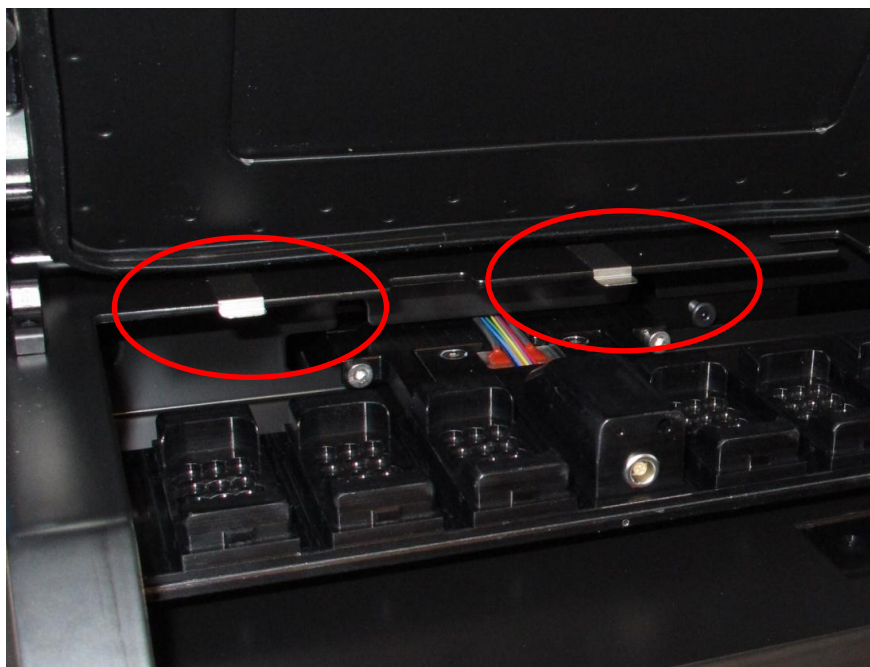

Oblast pro vkládání kultivačních misek inkubátoru s časosběrným snímkováním EmbryoScope s odstraněným krycím panelem a kovovými svorkami ve správné poloze.

Po čištění nebo dezinfekci inkubátoru s časosběrným snímkováním EmbryoScope je nutné vždy zkontrolovat, že jsou obě kovové svorky bezpečně připojené k horní části komůrky pro embrya.

Reakce uživatele

Pokud je třeba z inkubátoru s časosběrným snímkováním EmbryoScope vyjmout všechny kultivační misky EmbryoSlide, postupujte dle pokynů v uživatelské příručce inkubátoru s časosběrným snímkováním EmbryoScope nebo dle nouzového postupu popsaného pod servisním víkem inkubátoru s časosběrným snímkováním EmbryoScope.

Společnost FertiliTech uživatelům nedoporučuje inkubátor s časosběrným snímkováním EmbryoScope přestat používat.

Distribuce tohoto urgentního bezpečnostního oznámení

Toto oznámení je třeba předat všem osobám na Vašem pracovišti, které používají inkubátor s časosběrným snímkováním EmbryoScope.

Další kroky společnosti FertiliTech

Uživatelská příručka inkubátoru s časosběrným snímkováním EmbryoScope projde revizí. Aktualizujeme pokyny a zdůrazníme nutnost ověřit polohu dvou kovových svorek po čištění nebo dezinfekci.

Další informace

Pokud máte další otázky, obraťte se na zákaznické centrum/linku společnosti FertiliTech na telefonním čísle +45 7023 0500 nebo +1 781 681 9306 nebo mailem na adrese support@fertilitech.com nebo support-usa@fertilitech.com.

Kopii tohoto oznámení naleznete také na stránkách <http://fertilitech.com/en-GB/Support.aspx> a <http://fertilitech.com/en-US/Support.aspx>

S pozdravem



Henrik Wahlgren

Manažer kontroly kvality

Unisense FertiliTech A/S