














### Zkouška membránové klávesnice před uvedením do provozu

V rámci kontroly před uvedením do provozu je nutno vyzkoušet funkčnost všech tlačítek membránové klávesnice.



Použijte následující tlačítka membránové klávesnice, abyste spustili následující funkce:

Tlačítko		Popis
	ZAP/VYP	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zapněte přístroj</li> </ul>
	START	<ul style="list-style-type: none"> <li>Přejděte na úvodní obrazovku</li> </ul>
	Režim	<ul style="list-style-type: none"> <li>Přepněte do ventilačního režimu IPPV</li> </ul>
	START	<ul style="list-style-type: none"> <li>Spustíte ventilaci</li> </ul>
	Ruční vdech a výdech	<ul style="list-style-type: none"> <li>Spustíte ruční vdech a výdech; tlačítko přidržíte stisknuté do automatického ukončení vdechu a výdechu</li> <li>Uvolněním tlačítka zastavíte ruční vdech a výdech</li> </ul>
	Přestávka	<ul style="list-style-type: none"> <li>Spustíte přestávku ventilace</li> </ul>
	START	<ul style="list-style-type: none"> <li>Předčasně ukončíte přestávku ventilace</li> </ul>
	Smyčky	<ul style="list-style-type: none"> <li>Otevřete okno smyček</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Výběrový rám vložte do okna smyček</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Zavřete okno smyček</li> </ul>
	Křivky	<ul style="list-style-type: none"> <li>Otevřete okno křivek nebo vložte výběrový rám do okna smyček</li> </ul>
	Alarmové limity	<ul style="list-style-type: none"> <li>Otevřete okno alarmových limitů</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Výběrový rám vložte do okna alarmových limitů</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Zavřete okno alarmových limitů</li> </ul>
	Monitoring	<ul style="list-style-type: none"> <li>Přepněte na druhou numerickou tabulku</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Přepněte na první numerickou tabulku</li> </ul>
	Ztlumení alarmů	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ztlumte alarmy</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Alarmy opět zapněte nahlas</li> </ul>

 **Přístroj nelze uvést do provozu, pokud některé z tlačítek nefunguje podle očekávání!**

Všimněte si zejména stavu, kdy po krátkém stisku zůstane tlačítko trvale stisknuté. V tomto případě se obraťte na servis společnosti Heinen + Löwenstein (+49 2603 96 00 0).