

Siemens AG, H CP XP MK, Allee am Röthelheimpark 2, 91052 Erlangen

<Pověřené osobě z dané jednotky, kde je produkt firmy Siemens provozován, a vedoucímu administrativy organizace>

Kontaktní osoba z
regionální jednotky
Oddělení

Telefon
Fax
E-Mail

Datum

Bezpečnostní doporučení

- Všem uživatelům akviziční pracovní stanice ve spojení s mamografickým systémem Mammomat Inspiration firmy SIEMENS

Kontaktní osoba z
obchodní jednotky
Oddělení Heiderose Pfaff
H CP XP MK WH IN
+49 9131 847120

Telefon
Fax
E-Mail +49 9131 848456
Heiderose.Pfaff@siemens.com

Datum

Stůl akviziční pracovní stanice v kombinaci s mamografickým systémem Mammomat Inspiration/Fusion: Potenciální problém, pokud není stůl upevněn k podlaze

Vážený zákazníku,

Smyslem tohoto dopisu je informovat Vás o potenciálním problému a nebezpečí úrazu, když používáte stůl akviziční pracovní stanice systému Mammomat Inspiration (stůl laboranta s ochranným štítem proti záření, objednáací číslo 10549892), pokud není upevněn k podlaze.

Kdy se tato porucha objevuje a jaká jsou potenciální rizika?

Pokud jsou monitory umístěny příliš daleko od desky stolu, může se stůl akviziční pracovní stanice stát nestabilním, přičemž hrozí jeho převrácení a následné zranění uživatele.

Jaké kroky může uživatel uskutečnit, aby zabránil potenciálnímu nebezpečí pramenícímu z tohoto problému?

Pokud stůl není upevněn k podlaze, rozhodně doporučujeme umístit monitory na jeho pracovní desku, aby se zabránilo převrácení stolu.

Siemens AG
Healthcare Sector; Management: Hermann Requardt
Clinical Products Division; vedoucí: Britta Fuenfstueck
X-Ray Products; vedoucí: Andre Hartung

Allee am Röthelheimpark 2
91052 Erlangen
Německo

Tel.: +49 (9131) 84 0

Siemens Aktiengesellschaft; Předseda dozorčí rady: Gerhard Cromme;
Správní rada: Joe Kaeser, předseda, president a výkonný ředitel; Roland Busch, Klaus Helmrich,
Hermann Requardt, Siegfried Russwurm, Ralf P. Thomas
Registrované kanceláře: Berlin a München, Německo; Obchodní rejstřík: Berlin Charlottenburg, HRB 12300, München, HRB 6684
WEEE-Reg.-No. DE 23691322

Jak bude problém nakonec odstraněn?

Aby se tento potenciální problém vyřešil, firma Siemens připravuje nápravné opatření (XP060/14/S).

Jakmile bude toto opatření k dispozici, budete informováni pracovníkem své oblastní servisní služby firmy Siemens. Úpravy zahrnují novou podkladovou desku, která zabezpečuje zvýšenou stabilitu.

Mnohokrát Vám děkujeme za pochopení a spolupráci ve věci tohoto bezpečnostního doporučení a prosíme Vás, abyste neprodleně předali svým pracovníkům odpovídající instrukce. Zajistěte prosím, aby bylo toto bezpečnostní doporučení vloženo do návodu k použití systému. Dokud nebudou realizovány příslušné úpravy, Vaši pracovníci by měli mít toto nebezpečí na paměti.

Jestliže jste toto zařízení prodali nebo jste se jej zbavili jiným způsobem, takže již není ve Vašich silách jeho provoz jakkoli ovlivnit, laskavě Vás žádáme, abyste toto bezpečnostní doporučení odeslali novému vlastníkovi. Prosíme Vás také, abyste nás o novém vlastníkovi zařízení informovali.

Omlouváme se za veškeré potíže, které Vám mohl tento problém způsobit.

V úctě

Potvrzení přijetí

Adresa zákazníka:

Jako vlastník / odpovědný provozovatel přístroje s názvem < > a s výrobním číslem _____ (není nutné) tímto potvrzujeme, že jsme přijali následující dokument:

Bezpečnostní doporučení

< > s < >

Místo, datum _____

Jméno _____

Podpis _____