

Návod

na správné
oblékání
a ošetřování :
kompresních zdravotních
výrobků **Lonaris**

LOANA NANO MEDI s.r.o.



Výrobce:

LOANA NANO MEDI s.r.o.
Pod Kamenem 27,
756 63 Krhová, Česká Republika

Distributor:

Pobtex s.r.o.,
Volkova 437,
756 61 Rožnov pod Radhoštěm,
tel.: 571 663 658, mobil: +420 731 153 400,
e-mail: martin.poboril@pobtex.cz, www.loana.cz

Vážení zákazníci,

prejeme Vám příjemné nošení a spokojenosť s našimi výrobky pro léčbu a prevenci cévních onemocnění nohou. Pokud se budete řídit instrukcemi uvedenými v tomto návodu, podpoříte užitné vlastnosti těchto výrobků.

Postup při oblekání:

Kompressivní punčochy jsou vyráběny z elastických vláken, která svými vlastnostmi vytvářejí v celém výrobku plynulý léčebný přítlak od kotníku výše. Proto Vám zpočátku může připadat oblekání punčoch mírně obtížné. Avšak při opakováném oblekání získáte potrebnou zručnost.

Výrobek oblekajte na suchou nohu, nejlépe hned ráno před zatižením končetiny a to všedě. Neoblékejte výrobek za horní okraj, ale postupujte následovně:

U výrobků s otevřenou špičkou jsme pro snadnější navlékání přiložili hladký návlek, který se nasadí na prsty až po patu a po oblečení punčochy se stáhne návlek zpět.

Punčochu přetáhněte naruby po oblasti kotníku. Vsuňte palce dovnitř punčochy, mírně shrňte kousek přetažené části a natáhněte punčochu přes prsty na nárt a postupně přetáhněte přes patu. Pata je oblast, kde je třeba využít větší sílu pro přetažení punčochy. V oblasti kotníku je nejvyšší kompresivní tlak, výrobek je nejužší. Postupně přibírejte další část punčochy a pokládejte ji směrem ke kolenu, případně výše, podle typu punčochy.

Nakonec hlazením dlaněmi vyrovnajte případné záhyby a nerovnosti ve směru od kotníku výše, až pocítíte přiléhavý kompresivní účinek výrobku na celé ploše povrchu nohy.



Návod k ošetření:

- kompresivní zdravotní výrobky perte v rukách, nejlépe v mýdlovém roztoku do 40°C, neužívejte prostředků s bělícím účinkem
- dobře vymáchejte v čisté vodě
- vymačkejte mezi dvěma ručníky, nežďimejte
- sušte na stinném a vzdušném místě, nevy stavujte výrobky přímému slunečnímu záření a nesušte nad přímým zdrojem tepla

- pro čištění výrobků nepoužívejte žádná organická rozpouštědla (benzín apod.), protože chrápte před oleji, tuky, mastmi.

Několik důležitých rad nakonec:

Chráťte kompresivní výrobky před ostrými předměty, dbejte, aby ste při navlékání punčoch neměli na rukou prsteny. Nič, které jsou uvnitř výrobků, neodstranujte, tyto zde zůstávají z technologických důvodů a jejich přítomnost není závadou.

K udržení životnosti výrobku je třeba používat i vhodnou obuv, do uzavřené obuvi je výhodné nosit jemnou bavlněnou ponožku přes kompresivní punčochu.

Sledujte hodnotu kompresivní třídy, kterou pro Vaši léčbu určil lékař! Zkontrolujte, zda souhlasí údaje o kompresivní třídě na všetě etiketě ve výrobku s údaji na obalu výrobku. Totéž platí o datu výroby. Při jakémkoliv změně zdravotního stavu konzultujte s ošetřujícím lékařem vhodnost používání tohoto výrobku. Jedná se především o otoky zvýšené teploty apod.

Záruka 6 měsíců se vztahuje pouze na stálost kompresivního tlaku při běžném používání a při dodržování zásad k ošetřování výrobků.

Indikace

- primární a sekundární křečové žily
- těhotenské křečové žily
- prevence před trombózou
- tromboflebitida
- veškeré důsledky chronické žilní slabosti
- posttrombotický syndrom
- otoky v těhotenství
- posttrombotické a pooperační otoky
- cyklické a idiopatické otoky
- lymfatické otoky a otoky u nadváhy
- po sklerotizaci a po chirurgickém žilním zásahu
- angiodisplazie
- stav po zhojené flebitidě
- stav po tromboze



Kontraindikace

- pokročilá periferní obstrukční onemocnění
- dekompenzovaná srdeční insuficience
- septická flebitida
- flegmazie (zánět)



Datum vydání: 26.12.2017

Tabulka a místa měření výrobku značky Lonaris


Obvody měrných bodů v cm



Velikosti	1	1 plus	2	2 plus	3	3 plus	4	4 plus	5
cG	54-57	58-61	58-61	63-66	63-66	67-72	67-72	73-78	73-78
cF	46-49	50-53	50-53	55-58	55-58	59-62	59-62	63-66	63-66
cE	37-39	40-42	40-42	43-45	43-45	46-49	46-49	50-53	50-53
cD	32-34	35-37	35-37	38-40	38-40	41-43	41-43	44-46	44-46
cC	33-35	36-38	36-38	39-41	39-41	42-44	42-44	45-47	45-47
cB1	26-28	28-30	29-31	30-32	32-34	34-36	34-36	37-39	37-39
cB	20-22	20-22	23-25	23-25	26-28	26-28	29-31	29-31	32-35
cY	29-31	29-31	32-34	32-34	35-37	35-37	38-40	38-40	41-43
cA	20-22	20-22	23-25	23-25	26-28	26-28	29-31	29-31	32-35

Délka v cm

Krátká	Dlouhá
A -G/T	A -G/T
65-73	74-83
A -G	A -G
65-73	74-83
A - F	A - F
53-60	61-69
A - D	A - D
35-39	40-45

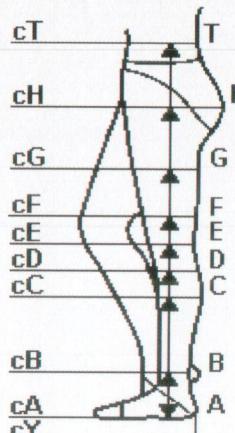

Legenda

- A -G/T Punčochové kalhoty
- A -G Stehenní punčochy
- A - F Polostehenní punčochy
- A - D Lýtkové punčochy
- cG- obvod stehna
- cF- obvod nad kolenem
- cE- obvod přes koleno
- cD- obvod pod kolenem
- cC- obvod lýtka
- cB1- obvod 10 cm nad kotníkem
- cB- obvod nad kotníkem
- cY- obvod přes patu
- cA- obvod nártu

Rozměrová tabulka LONARIS

Kontaktní údaje na výrobce Loana Nano Medi s.r.o.
731 153 400 / martin.poboril@loana.cz, zp@loana.cz