

A-4040 Linz, Kampmüllerweg 24
Tel.: 0732 / 70 99-0, fax: 0732 / 757 000

SCHILLER
A U S T R I A

A-110 Vídeň, Clemens-Holzmeister-Str. 4, Business Park
Vienna
Tel.: 01 / 699 95 55, fax: 01 / 699 95 49

Email: sales@schiller.at

Bezpečnostní upozornění

Výrobek: SCHILLER FRED easy

Věc: CHYBA NABÍJENÍ TRANSISTORU

DOTČENÉ VÝROBKY:

Mezi dotčené výrobky patří všechna zařízení SCHILLER FRED easy.

POPIS PROBLÉMU:

Uživatelé zaznamenali, že během nabíjení kondenzátoru se velmi zřídka u SCHILLER FRED easy zobrazí chybové hlášení „CHYBA NABÍJENÍ TRANSISTORU“.

MOŽNÉ RIZIKO:


Pokud se zobrazí chybové hlášení „CHYBA NABÍJENÍ TRANSISTORU“, stačí SCHILLER FRED easy restartovat. V nejhorším případě tak dojde k mírné prodlevě v defibrilaci, která má být provedena. Pravděpodobnost zobrazení tohoto chybového hlášení je 0,04% (0,4 na tisíc případů), a to dle zpráv z terénu. Z tohoto důvodu je riziko velmi nízké.

IDENTIFIKACE DOTČENÝCH VÝROBKŮ:

Všechna zařízení SCHILLER FRED easy na trhu.

POŽADOVANÁ OPATŘENÍ:

Zařízení FRED easy lze používat bez omezení. Pokud se zobrazí chybové hlášení „CHYBA NABÍJENÍ TRANSISTORU“, je zapotřebí zařízení vypnout a restartovat. Uživatelé budou informováni o změně v uživatelské příručce.

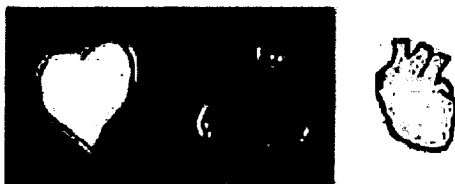

UMĚNÍ DIAGNOSTIKY

Offenlegung nach § 14 HGB: Rechtsform des Gesellschaft: Gesellschaft m.b.H. – Sitz: Linz –Firmenbuchnummer:
FN 86755 g. UID. Nr. ATU24430809

A-4040 Linz, Kampmüllerweg 24
Tel.: 0732 / 70 99-0, fax: 0732 / 757 000

SCHILLER
A U S T R I A

A-110 Videň, Clemens-Holzmeister-Str. 4, Business Park
Vienna
Tel.: 01 / 699 95 55, fax: 01 / 699 95 49

Email: sales@schiller.at

DALŠÍ INFORMACE A PODPORA:

Společnost Schiller vždy usiluje o splnění vysokých standardů kvality, které od našich zařízení očekáváte i po jejich nákupu, a z tohoto důvodu bychom Vás rádi požádali, abyste se pro bližší informace a podporu obrátili na svou kontaktní osobu ze společnosti Schiller.

Doufáme, že jste tyto informace shledali užitečnými.

Máte-li jakékoli další dotazy, neváhejte a obraťte se na nás.


Tel.: +43 732 7099 0
Fax: +43 732 75 70 00
Email: service@schiller.at

S pozdravem,

V Linci, 25/05/2012

(nečitelný podpis)

Ing. Mag. Christian Ecker MBA

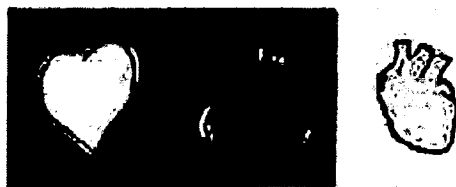

UMĚNÍ DIAGNOSTIKY

Offenlegung nach § 14 HGB: Rechtsform des Gesellschaft: Gesellschaft m.b.H. – Sitz: Linz – Firmenbuchnummer:
FN 86755 g. UID. Nr. ATU24430809