
NALEHAVÉ – Bezpečnostní instrukce (FSN)

Výrobky: Pomůcky pro přesuny klientů
Dotčené typy: **Všechny typy zvedáků** Minstrel, Minerva, Excelsior, Gemini vyrobené a dodané firmou Medibo Medical Products NV. nebo jejími distributory
Datum vydání: **Červenec 2012**
Druh opatření: **Upozornění:**

- Servisní instrukce
- Připomínka servisní údržby.

Referenční číslo: **FSN002/2012/PHD verze 2**

Na vědomí:

Všem držitelům uvedených výrobků. Včetně těch, kteří tyto výrobky užívají, předepisují jejich užívání, starají se o údržbu apod. Zejména: správcům a údržbářům, vedení ÚSP a DD, sestrám, terapeutům, pečovatelům a ostatním konečným uživatelům.

Popis problému:

Firma ArjoHuntleigh provedla průzkum trhu, v souladu se závazkem neustálého zlepšování služeb, a zjistila, že tyto zvedáky jsou při poskytování péče velmi intenzívně používány. Za posledních 10 let firma uvedla na trh novou generaci zvedáků, které využívají novější technologie a lépe reagují na nejnovější přísné bezpečnostní standardy.

Výsledky této studie také ukazují, že mnoho těchto zvedáků je používáno déle než 10 let a ne vždy jim je poskytován odpovídající servis a údržba v určených intervalech – což je naprosto nezbytné u zařízení sloužících k přesunu lehce zranitelných klientů.

Tato studie také odhalila několik stížností, že stoupá počet nežádoucích příhod, kdy došlo k poruše funkčnosti zvedáku staršího 10 let.

Důkladnější analýza těchto příhod nám ukazuje, že u mnoha výrobků nebyla prováděna pravidelná servisní údržba, což znamená vážné bezpečnostní riziko pro uživatele. Pokud nebyla prováděna pravidelná servisní údržba servisním technikem MEDIBO a následně servisním technikem ArjoHuntleigh, včetně pravidelných prohlídek, zátěžových testů a výměn opotřebitelných komponentů, pak doba životnosti takového výrobku může být výrazně kratší než 10 let.

Opatření

Ujistěte se prosím, že všechny výrobky mají preventivní plán údržby, a že údržbu podle tohoto plánu provádí kompetentní servisní technik s použitím nejnovějších postupů servisu a údržby. Následující pokyny Vám poradí, jak si u ArjoHuntleigh zařídit takový servisní plán údržby.

Prohlédněte prosím všechny výrobky, které nebyly takto udržovány, abyste se ujistili o jejich dalším bezpečném používání.

Rozeslání této Bezpečnostní instrukce:

Toto upozornění musí být předáno všem, kdo mohou ve Vaší organizaci uvedené informace potřebovat, nebo v organizacích, kam tyto zvedáky mohly být přemístěny.

Prosíme Vás o předání tohoto upozornění zařízením, která mohou být rovněž dotčena. Prosíme, informujte nás jako výrobce přiloženým Odpovědním formulářem, že jste tuto Bezpečnostní instrukci obdrželi a že jí rozumíte.

Prosíme Vás o zajištění, že si bude personál vědom tohoto upozornění a v něm uvedených opatření tak, aby byla zajištěna účinnost tohoto upozornění. Poté nám prosím zašlete zpět přiložený Odpovědní formulář.


Kontaktní údaje:

ArjoHuntleigh s.r.o.
Hlinky 118
603 00 Brno
mail: Arjo@ArjoHuntleigh.com
tel.: +420 549 254 252
www.ArjoHuntleigh.cz

Kontaktní osoba:

Lubomír Kachyňa
Jednatel

Níže podepsaný potvrzuje, že toto Upozornění bylo rovněž předáno příslušným dozorním a kontrolním orgánům.

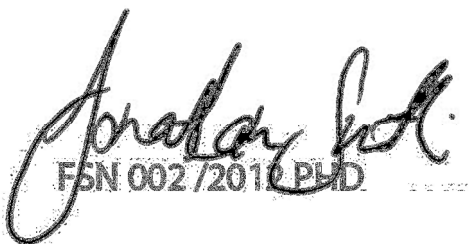

FSN 002/2010 PHD

Jonathan Smith – Group Vigilance Manager