



A.IMPORT.CZ spol.s r.o.
Petrská 29
Praha 1 POST 110 01
Czech Republic

DŮLEŽITÉ OZNÁMENÍ PRO PACIENTY

16. dubna 2012

Důležité informace o inzulínové pumpě Animas®

Vážená paní, vážený pane,

v rámci neustálého zlepšování našich výrobků se spoléháme na Vaše názory. Na základě Vašich komentářů jsme zlepšili odolnost klávesnice inzulínové pumpy, včetně tlačítek OK, nahoru a dolů a tlačítka kontrastu.

Naše předchozí klávesnice a další komponenty inzulínových pump byly navrženy a vyrobeny tak, aby odolaly opotřebení způsobenému běžným používáním v rámci obvyklých podmínek. U některých pacientů ale docházelo k postupnému opotřebení klávesnice inzulínové pumpy, které vedlo až k jejímu poškození (např. odlomení nebo odloupení rohu klávesnice od pumpy).

V rámci rutinní kontroly inzulínové pumpy se proto pravidelně zaměřte i na její klávesnici a zjistěte, zda nevykazuje známky opotřebení nebo poškození. Pokud ano, nemusí tlačítka reagovat tak, jak bylo zamýšleno. Všimnete-li si na klávesnici poškození nebo jiných potíží. Společnost Animas pečlivě prošetřuje všechny stížnosti týkající se klávesnic inzulínových pump. Pokud se potíže s klávesnicí potvrdí a pokud se na Vás vztahuje záruka společnosti Animas, bude Vám pumpa vyměněna bezplatně. Společnost Animas ve většině případů poskytuje záruku v délce čtyř let od data zakoupení (viz Příručka vlastníka).

Děkujeme, že jste si jako partnera pro svou léčbu zvolili společnost Animas.

S pozdravem

A.IMPORT.CZ spol.s r.o.
Petrská 29
Praha 1 POST 110 01
Czech Republic