



ISO 9001



ISO 13485



ASOCIACE VÝROBČŮ A DODAVATELŮ
ZDRAVOTNICKÝCH PŘÍSTŘEDKŮ



1999, 2000, 2002
2003, 2005, 2007

Váš dopis ze dne / ČJ

Naše značka
Du_120629_01

Vyřizuje/linka
377 590 426

V Plzni
4.7.2012

Vážený zákazníku,

společnost CHEIRÓN a.s. si Vás dovoluje informovat o možných technických problémech zdravotnického prostředku (ZP) monitor BeneView T1 společnosti Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co.,Ltd.

Společnost Mindray při testech rozeznala selhávání dobíjení baterie monitoru T1 v případě, kdy monitor T1 pracuje s monitory T5/T6/T8. Baterie nemůže být plně dobita díky ochraně proti nabíjení, která se aktivuje za určitých okolností. Výsledkem je, že monitor T1 má kratší provozní dobu při bateriovém napájení. Toto je možné zaznamenat skrze indikátor kapacity baterie umístěný v dolním pravém rohu obrazovky monitoru T1. Zároveň je spuštěno alarmové hlášení [Low Battery]/[Battery Depleted] v oblasti technických alarmů, když se baterie monitoru T1 vybíjí.

Dle našich záznamů jsme vám dodali v dubnu roku 2012 dva kusy ZP monitor BeneView T1, výrobní čísla: FB-21000209, FB-21000208, ke kterým se tato informace vztahuje. Náprava technického stavu u těchto ZP bude zajištěna ihned potom co nám výrobce dodá nový ZP.

Pokud byste se setkali s jakýmkoliv problémem při nápravě stávajícího stavu, kontaktujte prosím ihned vašeho dodavatele ZP, společnost CHEIRÓN a.s.

Společnost CHEIRÓN a.s. touto formou plní stanovené podmínky platné legislativy České republiky a předchází možným komplikacím, které by mohly vzniknout při Vaší klinické praxi.

Děkuji Vám za spolupráci

Monika Duffková
Odborný pracovník řízení jakosti