

Terumo® Advanced Perfusion System 1


Elektronický mísič plynů

Doplněk

Tento Doplněk obsahuje informace týkající se použití elektronického mísiče plynů Terumo® Advanced Perfusion 1.

Tento Doplněk mění kapitolu Elektronický mísič plynů, část Místní ovládání elektronického mísiče plynů, strana 8-6.

Místní ovládání elektronického mísiče plynů

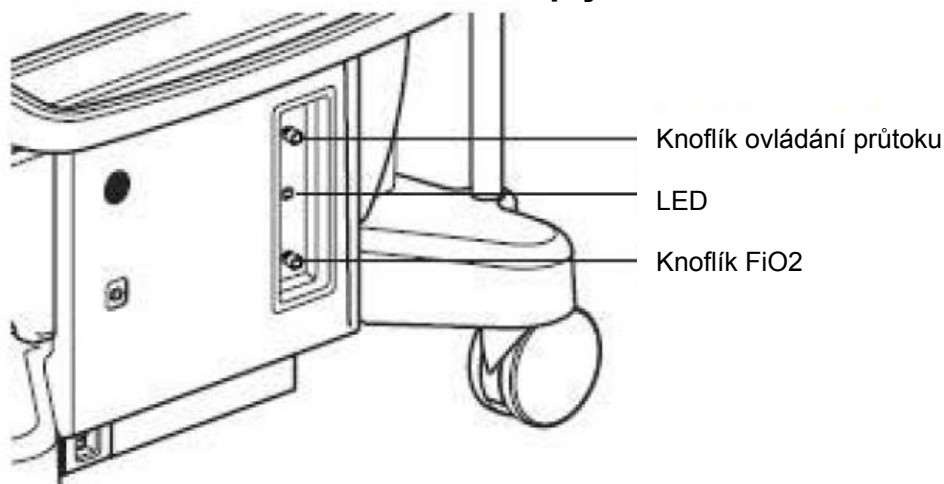

Elektronický mísič plynů lze ovládat z Centrálního ovládacího monitoru nebo místně knoflíkem FiO2 a knoflíkem ovládání průtoku umístěnými na přední straně základny System 1.

Ovládání průtoku plynu

Knoflík ovládání průtoku má označený směr otáčení, kterým se průtok zvyšuje a snižuje. Otočením proti směru hodin průtok plynu zvyšujete, otočením po směru hodin snižujete.

Knoflík místního ovládání průtoku plynu elektronického mísiče plynů System 1 nemá označen počet otočení potřebných ke zvýšení průtoku. Uživatelé musí mít na paměti, že elektronický mísič vyžaduje více otočení knoflíku než na odpovídajícím mechanickém mísiči. K výstupu musí být vždy připojen průtokoměr (součást dodávky sady příslušenství Terumo System 1) umožňující zjištění výstupního průtoku plynu.

Ovládání FiO2

Ovládací knoflík FiO2 má referenční značku a čárky po 0,1 zvyšování FiO2, s přesností +/- 10 % při mísení se vzduchem. Otočením knoflíku FiO2 po směru hodin zvýšíte podíl kyslíku ve směsi, otočením proto směru hodin podíl kyslíku snížíte.



Terumo Cardiovascular Systems Corporation
Ann Arbor, Michigan 48103-9300
(734) 663-4145 or (800) 262-3304 for technical information.
(800) 521-2818 for ordering information.



Terumo Europe N.V.
Interleuvenlaan 40
3001 Leuven, Belgium

AU Sponsor Terumo Corporation Australian Branch
NSW 2113, Australia

Terumo Corporation
44-1, 2-Chome, Hatagaya, Shibuya-ku,
Tokyo 151-0072, Japan

826627 R/A
May, 2012

LC-7462cs
(Český překlad z 826627 R/A)