



Terumo[®] Advanced Perfusion System 1

Péče o zařízení

Doplněk

Tento Doplněk obsahuje informace týkající se použití a údržby válcových čerpadel Terumo[®] Advanced Perfusion System 1.

Tento Doplněk mění podčást Péče o zařízení v části „Další Informace“ příručky použití (strana 12-8).

Po každém použití systém vyčistěte a zkontrolujte

Po každém použití ...	Vyčistěte a zkontrolujte součásti
Zkontrolujte válečková čerpadla	Zkontrolujte, zda se okluzní knoflík volně otáčí bez výrazných změn odporu. Pokud se okluzní knoflík neotáčí volně nebo pokud se mění odpor, kontaktujte poskytovatele servisu.



Terumo Cardiovascular Systems Corporation
Ann Arbor, Michigan 48103-9300
(734) 663-4145 or (800) 262-3304 for technical information.
(800) 521-2818 for ordering information.



Terumo Europe N.V.
Interleuvenlaan 40
3001 Leuven, Belgium

AU Sponsor Terumo Corporation Australian Branch
NSW 2113, Australia

Terumo Corporation
44-1, 2-Chome, Hatagaya, Shibuya-ku,
Tokyo 151-0072, Japan

826625 R/A
May, 2012

LC-7465cs
(Český překlad z 826625 R/A)