

V. Guldmann A/S
Graham Bells Vej 21-23A
DK-8200 Aarhus N, Denmark
Tel. +45 8741 3100
Fax +45 8741 3131
info@guldmann.com
www.guldmann.com
CVR. nr. 27 70 67 46

Pro: Správce zařízení

13. 7. 2012

Produkt: GH3 Zvedací ramínko



Model: Výrobek č. 550316 (střední)
Výrobek č. 550057 (malé)
Výrobek č. 550058 (x-malé)

Typ činnosti: Úprava uživatelské příručky:

- Aktualizováno a posíleno zaměření na to, jak připevnit Závěsnou plachtu na ramínko

Bezpečnostní instrukce: FSN/DK113

Důvod:

V posledních letech jsme zaregistrovali 7 incidentů v souvislosti s používáním / provozem GH3 zvedacího ramínka od firmy Guldmann. Jeden nebo více pásů nebyly správně umístěny do zvedacích ramínek, důsledkem bylo vypadnutí pacienta ze závěsné plachty, buď kompletně nebo částečně a to během zvedání.

Opatření:

Zvedací ramínko GH3 je bezpečný a spolehlivý produkt, riziko incidentu je extrémně malé. Nicméně podmínkou, aby bylo zajištěno bezpečné zvedání a přemísťování pacienta je, aby osoba, která pracuje s produktem zkontrolovala, zda-li jsou pásy ze závěsné plachty správně umístěny ve zvedacím ramínku a jestli je pacient správně umístěn v závěsné plachtě, zejména před zvedáním.

Proto jsme zvýraznili odstavec „Připojení závěsné plachty“ v uživatelské příručce.

Nové pokyny jsou v této bezpečnostní instrukci a nová uživatelská příručka bude automaticky zaslána všem zákazníkům v srpnu 2012. Počet uživatelských příruček bude odpovídat počtu zakoupených produktů.

Šíření bezpečnostní instrukce:

Prosím, předejte tuto informaci všem lidem ve Vaší firmě, kteří pracují s tímto produktem.

Dále Vás žádáme o výměnu stávajících příruček za nové, které přijdou v srpnu a informujte o tom zaměstnance.


V. Guldmann A/S potvrzuje, že byly informovány všechny příslušné orgány o této bezpečnostní instrukci.

Kontakt na pracovníka:

Máte-li jakékoli dotazy týkající se této záležitosti, obraťte se na místního zástupce Guldmann.

S pozdravem

V. Guldmann A/S

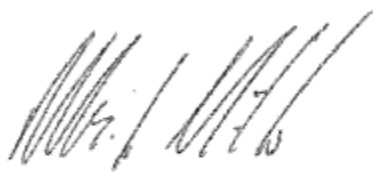

Ulrik Møller
Head of Technical Support

Závěsná plachta se čtyřmi nebo šesti pásy určenými na zavěšení na háky by měla být použita při využívání produktu Guldmann. Umístněte pásy na zvedací ramínko. Ujistěte se, že se gumové pojistky vrátí zpátky do výchozí polohy tak, aby se pásy nemohly samovolně uvolnit.

Závěsné plachty jiných výrobců

Guldmann nenese zodpovědnost za vady nebo nehody, které mohou nastat v důsledku použití závěsných plachet o jiných výrobců.

S veškerými pochybnostmi o výběru nebo použití závěsné plachty se obraťte na svého dodavatele.

Guldmann nenese zodpovědnost za vady nebo nehody způsobené v důsledku nesprávného použití závěsné plachty nebo z důvodu nedostatečné pozornosti ze strany pečovatele nebo uživatele.

Práce s GH3

GH3 běží v kolejnicovém systému a nemá žádné speciální požadavky na prostor a energii. Pozornost tedy může být zaměřena plně na uživatelskou funkčnost a na techniku pečovatele.

Jestli je zvedací zařízení použito správně, uživatel by měl být zvedán pouze do takové výše, kdy je mimo povrch a může být v této výši přemísťován.

Připojení závěsné plachty

Umístěte pásy od závěsné plachty do háků v závěsném ramínku. Začněte s vrchními pásy (zezadu) a potom připojte spodní pásy (od nohou).

Upozornění!!!

Bud'te opatrní při připojování závěsné plachty na háky. Zkontrolujte, zda byly popruhy úplně přetaženy přes gumovou pojistku (A) a zda jsou v háku zvedacího ramínka. Při stisknutí tlačítka pro zvedání uživatele, se ještě jednou ujistěte, že všechny popruhy jsou správně umístěny v háku zvedacího ramínka.

