

18. října 2012


Naším partnerům

P +46 8-557 62 200
F +46 8-557 62 299
info@handicare.se
www.handicare.com

Naléhavé bezpečnostní upozornění týká se Room TransferHook 70200010

Dotčené výrobky

Room TransferHook (RTH) dodávaný firmou Handicare AB před 30. březnem 2012. **Konstrukce dotčených háků nezahrnuje pružinové čepy**, červeně vyznačené na obrázku č.1.

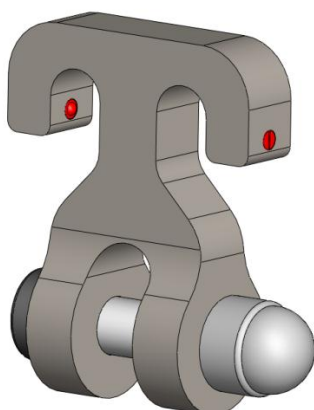

Obr. 1 Správná konstrukce dvojitého háku u Room TransferHook 70200010

Doplňující informace a důvod pro plošné bezpečnostní nápravné opatření

Při manévrování pacientem z jedné jednotky stropního zvedáku na jinou s použitím RTH, je kritický okamžik současného přemístění RTH mezi H-adaptéry na konci popruhů zvedáku (Obr. 2). Jestliže RTH není správně připevněn k H-adaptéru, může z adaptéru vyklouznout a způsobit, že pacient spadne na podlahu.



Obr. 2 Správné připevnění RTH k H-adaptérům

První typy háků RTH firmy Handicare neobsahovaly pružinové výstupky, ale byly jinak řešené. Aby se dále omezilo nebezpečí nesprávného použití, byly od 30. března 2012 zavedeny pružinové čepy. Jako preventivní opatření se firma Handicare rozhodla vyměnit všechny RTH háky starého typu.

Jaké kroky mají naši partneři udělat

Zkontrolovat bez prodlení RTH háky. Proved'te kontrolu vašich instalací, skladů atd. a odeberte háky, kterých se to týká. Ujistěte se, že jste je vyzvedli ze servisu a předepsaným způsobem je zlikvidujete.

Potvrďte, že jste obdrželi tuto informaci a zprávu podejte co nejdříve firmě Handicare AB, oddělení technické podpory. Kontakt viz níže.

Předávání tohoto plošného bezpečnostního upozornění

Tato zpráva má být předána všem, kdo potřebují být upozorněni ve vaší organizaci nebo v jakékoliv jiné organizaci, kam byly dotčené výrobky dodány.

Další informace a technické doporučení

Handicare AB zajistí nové háky RTH jako náhradu. Budou vám zaslány jakmile je firma Handicare AB bude mít na skladě, což bude během 2-4 týdnů.

Pro potvrzení, hlášení, dotazy a technické poradenství týkající se této záležitosti kontaktujte prosím:

Per-Erik Johansson
Technical support
per-erik.johansson@handicare.se
Phone: +468 557 622 26

Jens Nilsson
Technical support
jens.nilsson@handicare.se
Phone: +468 557 622 35

Handicare AB se zdvořile omlouvá za jakékoliv nepříjemnosti, které tato záležitost může způsobit jejím partnerům.

Tato zpráva byla předána příslušné regulační autoritě.

Pro a z pověření
Handicare AB

podpis

Malin Wallstrom
Manažer kvality a životního prostředí