
**Naléhavé upozornění týkající se bezpečnosti používaných výrobků
pro Českou republiku
Sprchový vozík Swift Mobil**

01. 11. 2012

Oprava používaných výrobků

Toto je překlad originálního Upozornění týkajícího se bezpečnosti používaných výrobků, podepsaného dodacím centrem společnosti Etac. Jakékoli dotazy týkající se tohoto dokumentu budou řešeny podle originálního Upozornění týkajícího se bezpečnosti používaných výrobků.

Vážený zákazníku,

pomocí tohoto Upozornění týkajícího se bezpečnosti používaných výrobků poskytuje společnost Etac informace o důležitých problémech ohledně opravy používaných výrobků Swift Mobil. Cílem tohoto Upozornění týkajícího se bezpečnosti používaných výrobků je, aby všechny zdravotnická zařízení s uživateli výrobků Swift Mobil obdržela důležité informace o pozadí a realizaci této opravy používaných výrobků.

Dotčené zdravotnické pomůcky:

Sprchový vozík Swift Mobil (zahrnuje modely Swift Mobil 160, Swift Mobil 24", Swift Mobil Tilt, Swift Mobil Tilt 160).

Etac Art.no;

- 80209410 Swift Mobil Tilt
- 80209422 Swift Mobil 160

Výrobní čísla: 3829 až 11028 (stejná série pro všechny výrobky Swift Mobil).

Pozadí:

Společnost Etac získala od několika uživatelů informace o závadách sprchového vozíku Swift Mobil. Bylo hlášeno, že v některých případech byla volná kolečka a v několika případech upadla. Společnost Etac si není vědoma, že by volná kolečka měla za následek nějakou újmu na zdraví nebo vážný úraz. Nicméně existuje potenciální riziko újmy na zdraví nebo poranění, pokud by se uvolnilo kolečko sprchového vozíku a vozík by se stal nestabilním.

Po důkladném prošetření došla společnost Etac k závěru, že hlášené uvolnění koleček mělo několik příčin. U požadovaného momentu pro utažení šroubů připevňujících kolečka k rámu nebyly v některých případech dodrženy specifikace výrobce.

Oprava používaných výrobků:

Aby se zabránilo potenciální možnosti uvolnění koleček, společnost Etac dobrovolně vydává tuto Opravu používaných výrobků pro všechny potenciálně dotčené sprchové vozíky. Této opravě podléhají všechny výrobky Swift Mobil s výrobními čísly 3829 až 11028. Všechna kolečka sprchových vozíků budou vyměněna, aby bylo zajištěno dlouhodobé bezpečné používání.

Bude vás kontaktovat zástupce společnosti Etac a domluví s vámi provedení výměny koleček.

Realizace by měla být zahájena v prosinci 2012 a bude provedena co nejrychleji, nejpozději do 30. června 2013.

Neexistují žádné důvody k tomu, aby se vozíky Swift Mobil přestaly používat, nicméně jako okamžité předběžné opatření před výměnou koleček žádáme zařízení, ve kterých jsou používány, aby vozíky zkontrolovala a pozorně sledovala, zda nejsou viditelné známky uvolnění koleček.

Společnost Etac se omlouvá za jakékoli nepříjemnosti a prosí, aby bylo toto upozornění předáno všem osobám ve vaší organizaci, které by o něm měly vědět, nebo jakékoli organizaci, do které mohla být potenciálně dotčená zařízení předána.

Pokud budete mít jakékoli komentáře nebo dotazy týkající se tohoto upozornění, obraťte se na vašeho distributora produktů Etac:

Meyra ČR s.r.o

Hrusická 2538/5
Praha 4- Spořilov
14100 Praha 4

Karel Jarolím ml.
Meyra ČR s.r.o.
Hrusická 2538/5
14100 Praha 4
Tel: 272 661 399
e-mail: jarolim.karel@meyra.cz

Níže podepsaná osoba potvrzuje, že toto upozornění bylo ohlášeno příslušnému regulačnímu úřadu v České republice.

Praha / 2.11.2012

S pozdravem

MEYRA ČR s.r.o.
Hrusická 2538, 141 00 PRAHA 4 - Spořilov
Tel.: 272 761 102, Fax: 272 760 408
DIČ: CZ41190327

Martin Charvát
obchodně technický ředitel
Meyra ČR s.r.o.
Hrusická 2538/5
14100 Praha 4
Tel: 272 661 244
e-mail: charvat@meyra.cz

Meyra ČR s.r.o
Hrusická 2538/5
Praha 4- Spořilov
14100 Praha 4