

Leden 2013

Důležité bezpečnostní upozornění

Bezpečné opětovné používání TJF-Q180V (N2551230)

Vážení zákazníci společnosti Olympus,

s ohledem na nedávno ohlášený případ kontaminovaného **videoduodenoskopu Olympus TJF-Q180V** bychom Vás rádi požádali, abyste věnovali zvýšenou pozornost následujícím bodům:

- Postupujte přesně podle všech instrukcí z manuálu pro opětovné používání TJF-Q180V,
- Věnujte zvláštní pozornost podrobným **instrukcím** pro postup **před čištěním**, zvláště pak na distálním konci a A-můstku.

Pro lepší přehled jsou připojeny instrukce k rychlému nahlédnutí. Považujte je prosím za doplňkové informace k instrukcím pro opětovné používání v manuálu.

Vedle výše zmíněných bodů bychom Vám také rádi připomněli, že TJF-Q180V, stejně jako veškeré endoskopy Olympus, musí před použitím u pacienta projít podrobnou přípravou a kontrolou. V případě, že zpozorujete jakákoli poškození nebo nesrovnalosti, nepoužívejte endoskop a kontaktujte společnost Olympus, aby provedla kontrolu a opravu. Použití endoskopu, který není ve stoprocentním stavu, může ohrozit bezpečí pacienta nebo vyšetřujícího a může vést k ještě vážnějšímu poškození přístroje.

Další informace k nutným krokům naleznete ve 3. kapitole „Příprava a kontrola“ návodu k použití TJF-Q180V. Další kopie návodu k použití nebo výše zmiňovaného manuálu pro opětovné používání jsou Vám na požádání kdykoli k dispozici.

Věříme, že připojené informace Vám budou užitečné, budete-li však mít jakékoli otázky nebo byste rádi obdrželi další instruktáž ohledně kteréhokoli aspektu péče a údržby Vašeho přístroje Olympus TJF-Q180V, obraťte se prosím na svého místního zástupce společnosti Olympus, který pro Vás s potěšením zařídí vše potřebné.

Vyplněný odpovědní formulář prosím zašlete nejpozději do **30.1.2013** poštou, faxem nebo digitálně naskenovaný na:

Olympus Czech Group, s.r.o., člen koncernu
Servis zdravotnické techniky
Evropská 176/16
160 41 Praha 6

Telefon: 221 985 393 / Fax: 221 985 574
E-mail: kolibacova@olympus.cz



Odpovědní formulář

Olympus Czech Group, s.r.o.
Servis ZT, Kolibáčová Helena
Evropská 176/14

160 41 Praha 6

8.1.2013

Č.j. 145-006

Tel. 221 985 393

Důležité bezpečnostní upozornění: Bezpečné opětovné používání TJF-Q180V

Vážení,

tímto potvrzujeme přijetí Vašeho dopisu. Obsažené informace předáme příslušným oddělením.

Jméno_____

Nemocnice_____

Oddělení_____

Ulice_____

PSČ / obec_____

Datum

Podpis