



Kontrola zapojení sterilního adaptéru

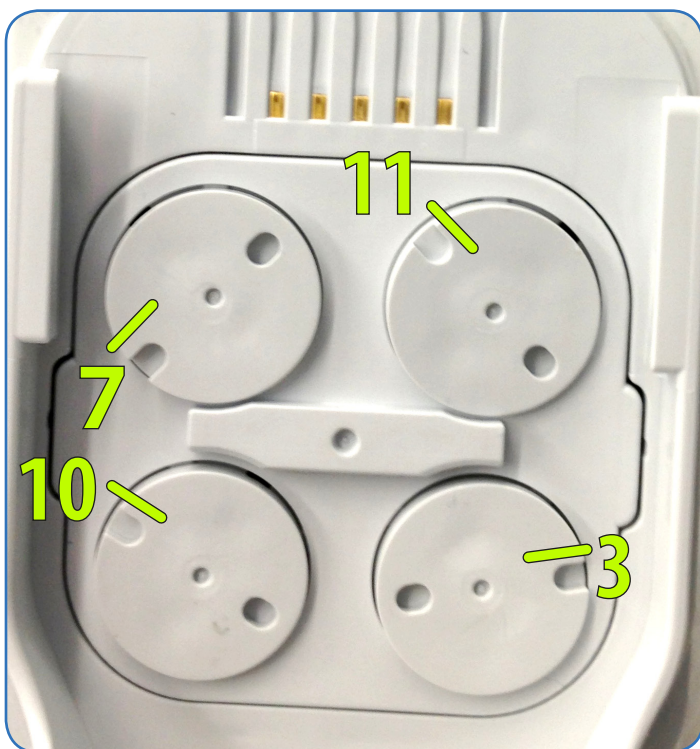

Poté, kdy je sterilní adaptér připojen a disky se otáčejí dozadu a dopředu, ověřte polohu otevřené drážky na každém disku.

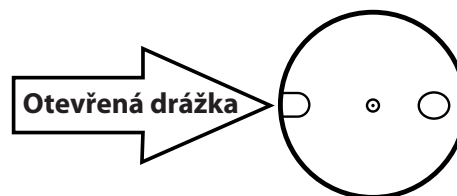

Otevřete umístění drážky:

Nejvyšší levý disk - 7 hodin

Nejvyšší pravý disk - 11 hodin

Spodní pravý disk - 3 hodiny


Spodní levý disk - 10 hodin

po směru hod. ručiček vlevo nahoře:


"7, 11, 3, 10"

Disky by měly být v tomto seřazení za zakrytím a před každou instalací nástroje.

Jakmile je sterilní adaptér úspěšně připojen na rameno, nemělo by být zapotřebí jeho odstranění nebo resetování až do konce případu.

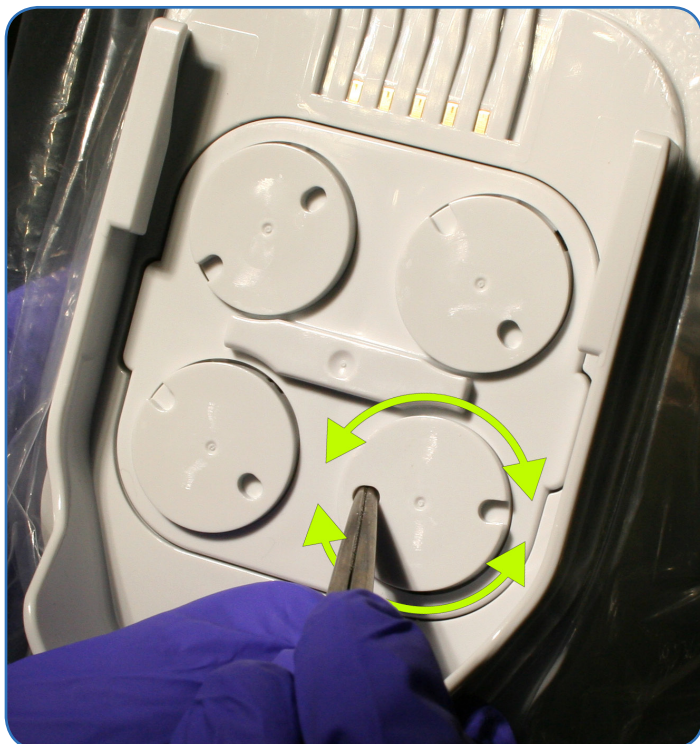


Pokud jakákoliv otevřená drážka neodpovídá výše uvedené pozici, použijte uzavřený hrot sterilního Kelly Forceps nebo nástroj Hemostat pro manuální otáčení disku.

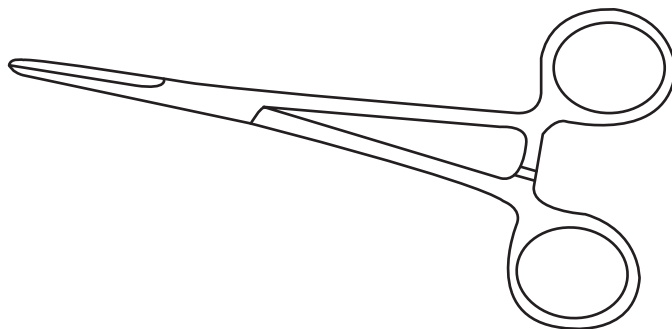

Otáčejte diskem jedním směrem dokud nezapadne na místo. Disk by se už neměl otáčet, jakmile je zcela zasunut.

Nejlepší způsoby instalace nástroje

1. Zkontrolujte před instalací nástroje, že jsou disky vyrovnány využitím procesu na každé straně.

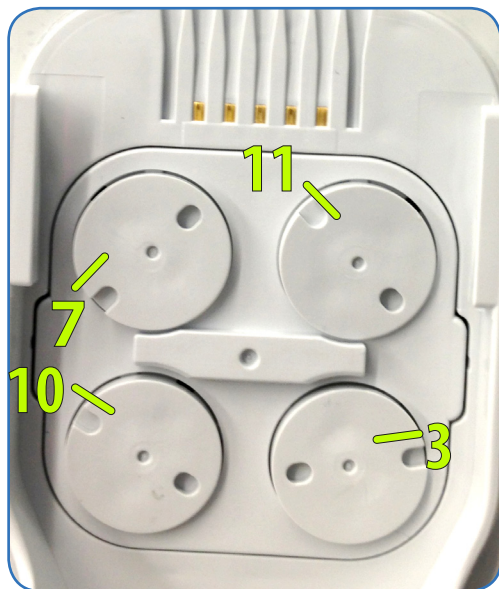

2. Nemačkejte uvolňovací páčku, když instalujete přístroj na sterilní adaptér.



3. Při instalaci přístroje nevyvíjejte velkou sílu.



4. Zkontrolujte, že lze čepy na zadní straně ramene propláchnout a že nevyčnívají.



Odstraňování problémů

Pořadí:

- 1) Pokud nástroj není zapojen správně, nasadte ho znovu.
- 2) Pokud problém není vyřešen, nasadte znovu sterilní adaptér a použijte verifikační proces
- 3) Pokud problém není vyřešen, rameno přikryjte rouškou

Kontakt dVSTAT: USA 800-USA 800-876-1310, mimo USA +800 0821 2020 nebo +41 21 821 2020