


Kontrola kazet ORTHO BioVue® systému

Krok	Postup
1.	Před použitím proveďte vizuální kontrolu zasažených lotů kazet systému ORTHO BioVue® (viz CL13-198_zasažené produkty).
2.	Dejte kazetu tak, že orientační značka je umístěna na pravé straně.
3.	- Jestliže název reagentu/kazety se nachází, jak je ukázáno na obrázku 1a, můžete kazetu použít pro testování. - Jestliže je bar kód umístěn, jak je ukázáno na obrázku 2b, nepoužívejte tuto kazetu.
4.	Nepoužívejte kazety systému ORTHO BioVue® s nesprávně umístěnými nálepkami (obrázek 2b). Kontaktujte Vaši technickou zákaznickou podporu, abyste ji informovali o této záležitosti a požádejte ji o odbornou spolupráci na čísle +420 543 236 007.

Správně umístěná nálepka

(pohled zepředu - obrázek 1a)

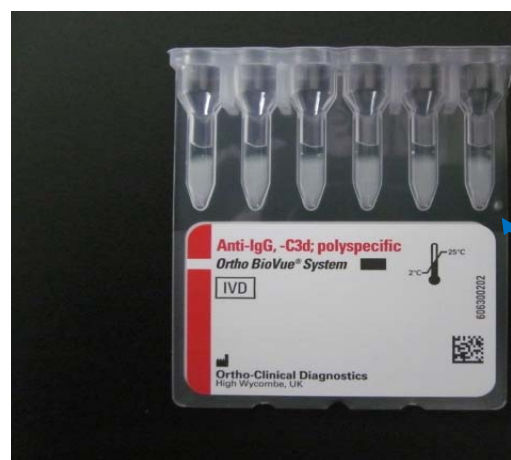

Orientační
značka na
pravé
straně s
názvem
reagentu

(pohled zezadu - obrázek 1b)



Nesprávně umístěné nálepky

(pohled zepředu - obrázek 2a)



Orientační
značka na
pravé
straně s
názvem
reagentu

(pohled zezadu - obrázek 2b)

