

<Date>

PR1302180002

NALÉHAVÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

«IA_Customer_Name»
«IA_Facility_Site»
«IA_Street_Address»
«IA_City», «IA_State» «IA_Zip_Code»

Týká se: DX-D 100: Občasný neúmyslný pohyb

Produkt: DX-D 100

Vážený zákazníku,

Společnost Agfa HealthCare by vás ráda upozornila na následující skutečnosti, které byly současně sděleny i kompetentním orgánům ve vaší zemi.

Zařízení

Toto Bezpečnostní upozornění se týká našeho mobilního DR zařízení „DX-D 100“.

Jak vyplývá z našich záznamů, jste vlastníkem tohoto produktu.

Popis tohoto produktu naleznete na našich webových stránkách:

- [DX-D 100 s bezdrátovým detektorem](#)
- [DX-D 100 s připevněným detektorem](#).

Problém

V poslední době někteří naši zákazníci pozorovali občasný nechtěný pohyb mobilního zařízení DX-D 100 během převážení.

Úkony

Zařízení je vybaveno bezpečnostním spínačem umístěným v madle pro manipulaci při převážení. Při uvolnění manipulačního madla se zařízení zastaví.

V případě nechtěného pohybu se nepokoušejte napravit tento pohyb prostřednictvím manipulačního madla, nýbrž toto madlo okamžitě uvolněte, aby se zařízení zastavilo.

Pokud pozorujete nechtěný pohyb, je nutné vyřadit zařízení z provozu. Upozorněte ihned servisní oddělení společnosti Agfa.

Žádáme vás, abyste rozeslali tuto informaci všem, kteří by měli být o této skutečnosti vyrozuměni.

Vyplňte, prosím, co možná nejdříve přiložený formulář a zašlete nám jej zpět.

Pokud se výše uvedené informace vašeho zařízení netýkají, nebo pokud jste zařízení předali jiné organizaci, budte prosím tak laskavi a vyznačte tuto skutečnost na připojený odpovědní formulář a předejte toto Naléhavé bezpečnostní upozornění organizaci, do které bylo zařízení převedeno.

Děkujeme vám za pozornost, kterou této záležitosti věnujete, a za vaši trvalou podporu.

Pokud byste měli nějaké dotazy k této záležitosti, obraťte se prosím na svou místní organizaci Agfa HealthCare. <Name of contact person> na <Tel>.

S úctou

Paul Merckx, Head of QARA Imaging Business Division



Agfa HealthCare NV
Septestraat 27

<Date>

PR1302180002



B-2640 Mortsel
Belgie

<Date>

PR1302180002

**NALÉHAVÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ
ODPOVĚDNÍ FORMULÁŘ**

Laskavě vás žádáme, abyste nám tyto informace zaslali co možná nejdříve zpět.
Děkujeme za vaši spolupráci.

Název zařízení/Jméno
zákazníka:

«IA_Customer_Name» «IA_Facility_Site»

Adresa:

«IA_Street_Address»

«IA_City», «IA_State» «IA_Zip_Code»

Upozornění:**PR1302180002****Produkt:****DX-D100**

- ☐ Potvrzuji, že jsem obdržel/a a porozuměl/a připojenému upozornění.
- ☐ Toto upozornění se našeho pracoviště netýká.
- ☐ Zařízení bylo převedeno na jinou organizaci.

Zákazník

Název:

Pozice:

Podpis:

Datum:

Telefonní číslo:

- ☐ Vyplňte, prosím, následující kontaktní informace:

Název zařízení/Jméno
zákazníka:

Adresa:

**Odešlete tento vyplněný formulář faxem na číslo <fax no.>
nebo jej zašlete e-mailem na adresu <email address>. Vyznačte přitom do pole
předmětu shora uvedený referenční kód.**