

**Našim zákazníkům používajícím
stropní stativy CSU 803x/CSU603x**

Důležitá bezpečnostní informace!!!

**Stropní stativy Dräger CSU 803x / CSU 603x (rok výroby 1997-2003):
Padající zdvihací ramena v důsledku mechanického zlomení šroubovice v motorové jednotce**

Vážení zákazníci,

Srpen 2013

v rámci pravidelného sledování mezinárodního trhu jsme zjistili případy, při kterých se zlomila šroubovice v motorové jednotce, která zdvihá a spouští dolní zdvihací rameno. To mělo za následek, že zdvihací rameno spadlo asi o cca 60 cm (23,6 palců).

Při zlomení šroubovice může být personál stojící pod stropním stativem zraněn nebo může dojít k poškození předmětů.

Jako hlavní příčina zlomení šroubovice byla stanovena nakloněná poloha motoru. V uvedených případech byla nakloněná poloha způsobena:

- 1) Zablkováním spojovacích os nebo
- 2) Nedostatečnou symetrií podpůrné desky (nesprávná/nakloněná poloha zdvihacího ramena) nebo
- 3) Předchozím mechanickým poškozením v důsledku nadměrného dynamického zatížení (kolize ramen, zapření ramen do okenních překladů apod.). To může mít za následek deformaci nosné desky a ta následně způsobí zlomení šroubovice únavou materiálu.

Tyto tři potenciální příčiny mohou být rozpoznány během údržby. Prováděním pravidelné údržby můžete předejít tomuto typu poruchy.

Podle informací v návodu k použití musí být údržba prováděna v pravidelných intervalech. To je jediný způsob, jak zajistit bezpečnost a spolehlivost během doby použití. Další inspekce umístění motorové jednotky jsou zahrnuty v naší dokumentaci o údržbě. U zákazníků, kteří mají uzavřenou servisní smlouvu se společností Dräger pro stropní stativy CSU 803x/603x a u zákazníků bez servisní smlouvy, kteří pravidelně využívají společnost Dräger pro provádění údržbových prací, bude tato inspekce, která předchází potenciálnímu zlomení šroubovice, provedena během příštího cyklu údržby bezplatně.

Pokud nemáte uzavřenou servisní smlouvu, můžete pověřit společnost Dräger nebo její smluvní partnery provedením této inspekce za poplatek. Případně může být inspekce provedena vyškoleným servisním technikem. Příslušné pokyny jsou připojeny.


Pokud zjistíte naklonění motorové jednotky, co možná nejdříve ji přemístěte. V takovém případě dbejte zvláštní opatrnosti, aby se pod hlavou stativu nenacházely žádné osoby nebo předměty, dokud nebude motorová jednotka přemístěna.

Stropní stativy Dräger CSU 803x/603x byly vyráběny nebo distribuovány 10 let a tyto výrobky byly v každodenním použití po dobu desíti až šestnácti let. Proto Vám vzhledem k jejich stáří rovněž doporučujeme najít v střednědobém horizontu alternativní řešení.

V případě jakýchkoliv dotazů kontaktujte, prosím, odpovědnou osobu společnosti Dräger.

S pozdravem

Ing. Michal Genza
jednatel společnosti Dräger Medical

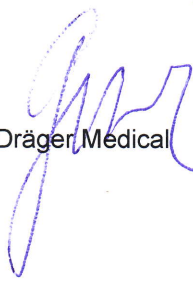

Dräger Medical s.r.o.
Pod Sychrovem I - 81
101 00 Praha 10