



**Všem zákazníkům a uživatelům
držáků monitorů Dräger s pružinovým ramenem AC2000
– stropní instalace –**

Důležitá bezpečnostní informace!!!

Stropní instalace Dräger s držákem monitorů
- pokud se držák monitorů zlomí, monitor může spadnout
- tento problém se týká pružinových ramen Ondal AC 2000 dodaných v letech 2005 a 2006 (G93358 a G93359)

Vážení zákazníci,

přestože jsme v únoru 2014 iniciovali bezpečnostní opatření, byli jsme v rámci pravidelného sledování mezinárodního trhu informováni o dalším případě, kdy došlo k rozlomení sváru v pružinovém ramenu držáku monitorů. Hrozí tak pád monitoru, který může být v nejlepším případě (v závislosti na své hmotnosti) zachycen kabely nacházejícími se v okolí pružinového ramena. Přestože nebylo zaznamenáno žádné zranění, nelze nebezpečí zranění osob nacházejících se pod monitorem vyloučit.

Výše uvedené bezpečnostní opatření z jara 2014 dostatečně nevysvětlilo, že sériové číslo obsahuje datum. Proto mnoho sériových čísel, kterých se toto opatření týkalo, nebylo identifikováno.

Příklad:

0111 085 12312

08 uvádí srpen jako měsíc výroby a **5** odkazuje na rok výroby 2005

(Vysvětlení: Jednoduše řečeno, číslo 0111 085 xxxxx je nad sériovým číslem 0111 066 xxxxx, které bylo určeno jako hraniční, ale jelikož se jedná o datum (085 = srpen 2005), znamená to, že výrobek byl vyroben před 066 = červnem 2006 a tudíž se ho toto opatření týká.)

Toto opatření se týká následujících pružinových ramen, která musí být vyměněna:

Objednací číslo	Popis	Dotčená výrobní čísla
G93358	Pružinové rameno se 2 displeji 13.5-21 MO SD	všechna 0111 065 xxxxx všechna 0111 075 xxxxx všechna 0111 085 xxxxx všechna 0111 095 xxxxx všechna 0111 105 xxxxx
G93359	a Pružinové rameno s 1 displejem 7-12 MO SD	všechna 0111 115 xxxxx všechna 0111 125 xxxxx

Proto bychom Vás rádi opět požádali o spolupráci při lokalizaci a výměně zbylých pružinových ramen:

- Použijte, prosím, přílohu (obrázky, objednáací a sériová čísla) ke kontrole Vašich stropních instalací a identifikujte dotčená pružinová ramena „AC2000“.
- Pokud takovéto držáky objevíte, informujte, prosím, zástupce společnosti Dräger. Bude Vám provedena bezplatná výměna pružinového ramena.
- Informujte, prosím, personál, že tyto instalace nesmějí být umísťovány nad osoby a že s monitory se do provedení výměny musí manipulovat s velkou opatrností (např. držení monitoru oběma rukama). Zejména nesmí docházet k polohování monitorů za použití síly – je třeba minimalizovat namáhání dolního kloubu pružinového ramena.

Rádi bychom se omluvili za případné nepříjemnosti, které může toto opatření způsobit, ale věříme, že je v zájmu bezpečnosti pacientů a uživatelů.

V případě jakýchkoliv dotazů kontaktujte, prosím, odpovědnou osobu společnosti Dräger.

S pozdravem

Ing. Michal Genza
jednatel společnosti Dräger Medical


Dräger Medical s.r.o.
Pod Sychrovem I-81
101 00 PRAHA 10


Příloha:

Obrázky pro identifikaci a ověření objednáacího a sériového čísla
Seznam dotčených objednáacích a sériových čísel

PŘÍLOHA PRO OVĚŘENÍ:

Příklad dotčené instalace:


Monitor s pružinovým ramenem AC2000

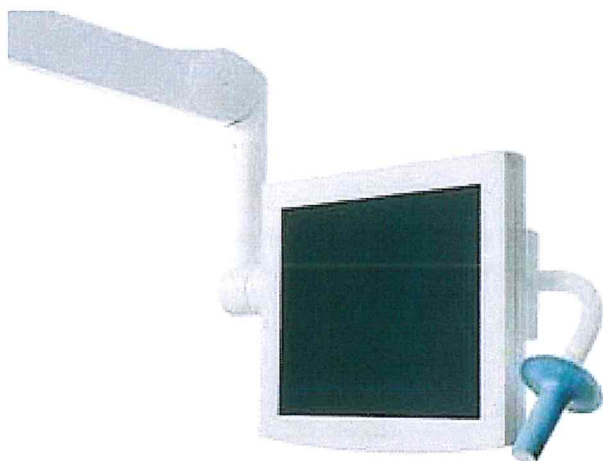

Identifikace dotčených instalací a/nebo pružinových ramen:


Dotčený kloub

Umístění typového štítku

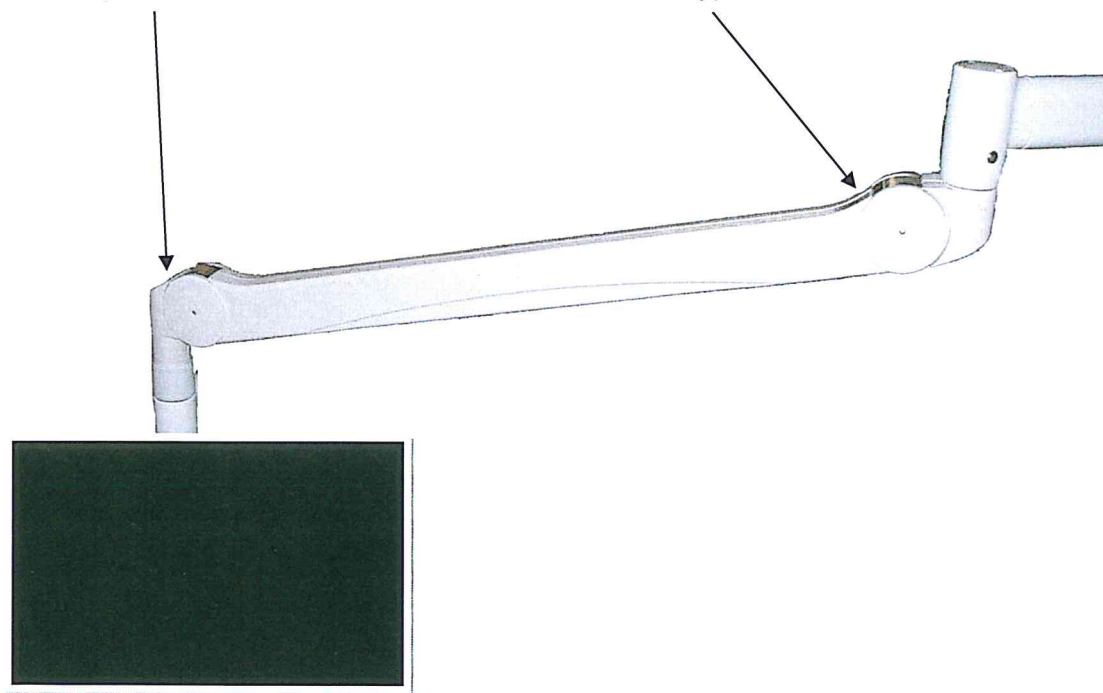

Ověření objednáciho a sériového čísla pružinového ramena:

Sériové číslo výrobce je umístěno v horní části pružinového ramena poblíž **horního kloubu** (v tomto příkladu je znázorněno objednáací číslo G18668):

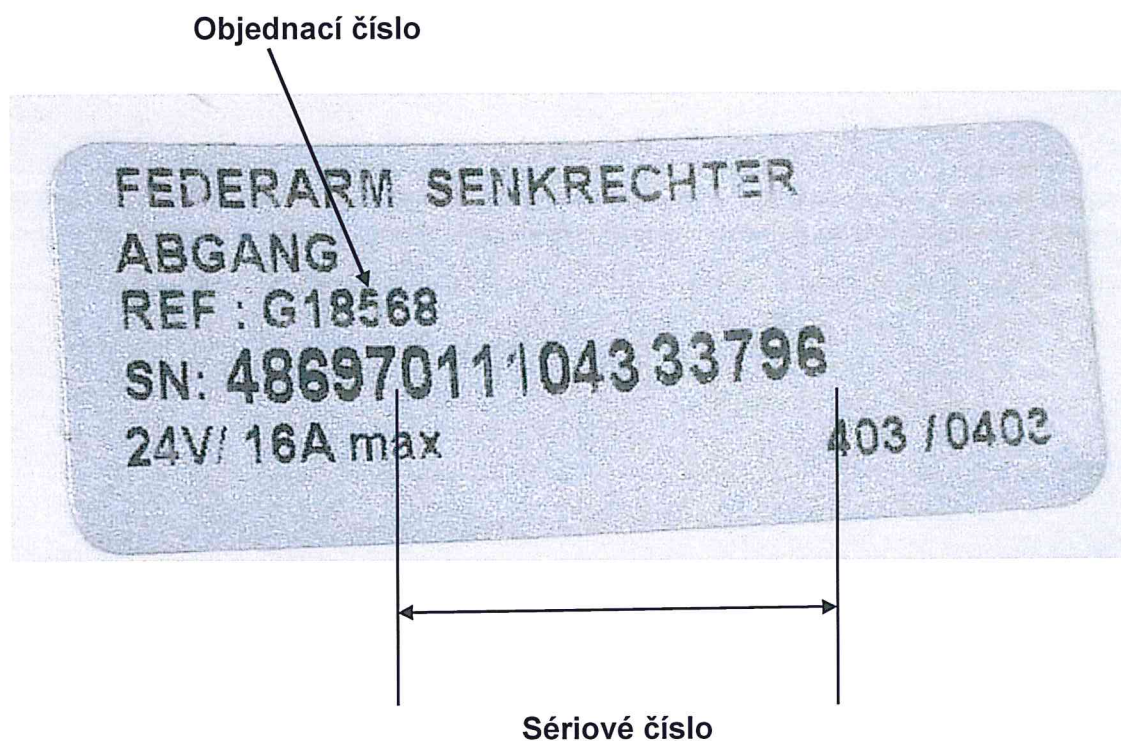

Seznam dotčených objednáacích a sériových čísel

Objednáací číslo	Popis	Dotčená výrobní čísla
G93358	Pružinové rameno se 2 displeji 13.5-21 MO SD	všechna 0111 065 xxxxx všechna 0111 075 xxxxx všechna 0111 085 xxxxx všechna 0111 095 xxxxx všechna 0111 105 xxxxx
G93359	Pružinové rameno s 1 displejem 7-12 MO SD	všechna 0111 115 xxxxx všechna 0111 125 xxxxx

